




【バスリフト】バスピアKAシリーズ（ワイド浴槽）への設置ガイド

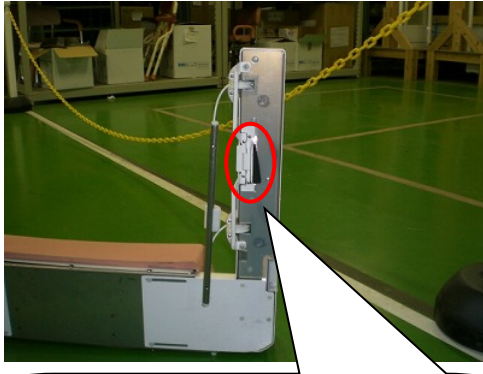

①EWBP108 に同梱されているスペーサーを上記箇所に『必ず』貼り付けてください。（反対側も同様）
 ※浴槽内幅が広いので、スペーサーがないと、バスリフトを固定できません。

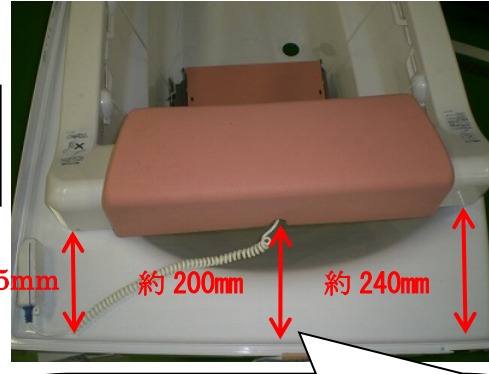


②バスリフトを浴槽の幅が広い側に取り付けてください。上記寸法値は壁からの距離で取付位置の目安（参考値）です。
 ※現場により取付位置は上記の通りとは限りませんので、バスリフトがきちんと固定されているか必ずご確認ください。

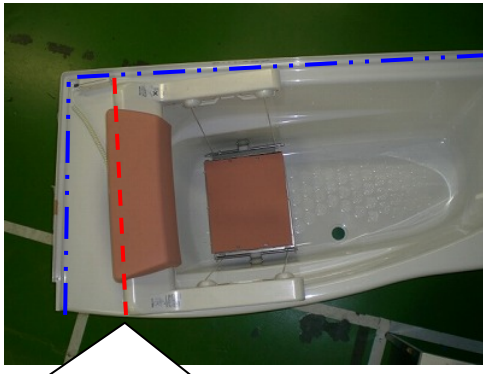

③取付後を上から見た状態です。
 ※KAワイド浴槽の場合、浴槽の内壁が浴室の壁面（上図青線）に対し斜めになっているため、バスリフトはそれに合わせて斜めを向いた状態となります。



④同じく取付後を横から見た状態です。

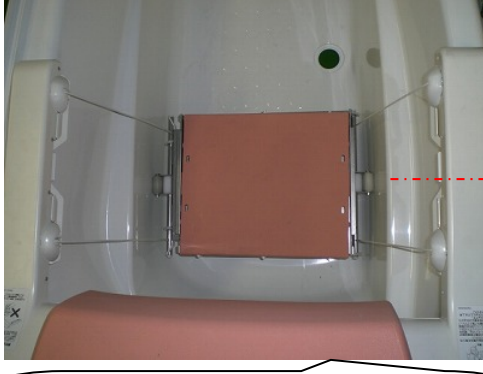

⑤取付後の浴槽内部の状態です。
 ※シートのガイドコロの状態がわかりやすいように、わざとフラップと乗越えキットを外して撮影しております。実際にはきちんと取り付けられた状態でご使用ください。



取付後に何度か昇降させてみて、ワイド浴槽の内壁にバスリフトのガイドコロ（上図ローラーのこと）がきちんと平行に接触しているかご確認ください。※接触しない場合は、本体の向きを修正ください。