

RDシリーズ と バスリフト 設置可否

シリーズ	浴室 サイズ	浴槽	設置位置	バスリフト (EWB100RN) 設置可否	アームレスト 乗越えキット品 番(別手配)	セレクト・オプションとの設置可否					
						ハンド グリップ	バス 水栓	サポ- ート バー	追いだき加工	ヒカルリモコン	ワンプッシュ 排水栓
RD	1116	ラウンド浴槽	背側	○※1	EWBP108S	×※7	○	-	○	△※8	△※14
	1216/1218		背側	○※1		×※7	○	-	○	△※8	△※14
	1317		背側	○※2		×※7	○	-	○	△※8	○
	1416/1418		ステップなし側	○※3※12		×※7	△※10	△※11	○	△※9	○
	1620/1618/1616			○※4※12		○	△※10	○※13	○	△※9	○

※1: 入浴スペースが確保できないため脚側には設置不可。

※2: 本体が前方にずれて落下する恐れがあるため脚側には設置不可。

※3: ステップまでの距離が短いため、身体状況によっては使いにくい場合があります。
バスリフトの設置前提で浴室を選定する場合は、他の浴室をおすすめいたします。
また、別売のシート用スペーサー(品番:EW39006R)が必要です。
(シートのガタツキを解消するため)Fタイプはサポートバーベンチ幅タイプをセレクトの場合のみ設置可能です。

※4: 背当てボード設置不可。

※5: バスリフト座面前方のクリアランスが800mm以下のため。

※6: ワンプッシュ排水栓側には取付不可。またブローバス有の場合、取付不可。(バスリフト座面前方のクリアランスが800mm以下になるため。)

※7: ハンドグリップに干渉するため設置不可。

※8: 設置は可能ですが、ヒカルリモコンありの場合、ヒカルリモコンの操作がしづらくなります。

※9: 設置は可能ですが、Fタイプ以外はヒカルリモコンありの場合、ヒカルリモコンの操作がしづらくなります。

※10: Fタイプ(ステップなし側にバス水栓を設置)は設置不可。

※11: サポートバー全幅タイプ(基本仕様)は設置不可。

※12: Fタイプでカウンター側に設置する際、トランスファーボードは併用できません。

※13: Fタイプの場合、カバークッションの着脱がしづらくなるためサポートバーはベンチ幅タイプをおすすめします。

※14: 排水栓と干渉して傷つくおそれがあるためシート用スペーサーEW39006Rを取り付けてください。