

シリーズ	浴室 サイズ	浴槽	設置位置	バスリフト (EWB100RN) 設置可否	アームレスト 乗換えキット品番 (別手配)	セレクト・オプションとの設置可否				
						ハンド グリップ	バス 水栓	追いだき加工	ヒカル リモコン	ワンプッシュ排水栓 (本体・操作部)
RW	1116	ラウンド浴槽	背側	○※1	EWBP108S	×※7	○	○	△※8	△※15
	1218/1216	ゆるり浴槽	—	×※5	—	—				
		ラウンド浴槽	背側	○※1	EWBP108S	×※7	○	○	△※8	△※15
	1316/1317/1318	ゆるり浴槽	ヘッドレストなし側(脚側)	○	不要	×※7	○	△※17	○	×※14
		ラウンド浴槽	背側	○※2	EWBP108S	×※7	○	○	△※8	○
	1416/1418	ゆるり浴槽	ヘッドレストなし側(脚側)	○※16※18	不要	×※7	○	△※17	○	△※15
		ラウンド浴槽	ステップなし側(背側)	△※3	EWBP108S	×※7	○	○	△※8	○
	1616/1620	ゆるり浴槽	ヘッドレストなし側(脚側)	○※16※18	不要	×※7	○	△※17	○	△※15
1616/1620	ラウンド浴槽	ステップなし側(背側)	○※4	EWBP108S	○	○	○	△※8	○	

※1: 入浴スペースが確保できないため脚側には設置不可。

※2: 本体が前方にずれて落下する恐れがあるため脚側には設置不可。

※3: ステップまでの距離が短いため、身体状況によっては使いにくい場合があります。バスリフトの設置前提で浴室を選定する場合は、他の浴室をおすすめいたします。
また、別売のシート用スペーサー(品番:EW39006R、希望小売価格:¥2,800)が必要です。(シートのガタツキを解消するため)
Fタイプはサポートバーベンチ幅タイプをセレクトの場合のみ設置可能です。

※4: 背当てボード設置不可。

※5: バスリフト座面前方のクリアランスが800mm以下のため。

※6: ワンプッシュ排水栓側には取付不可。またブローバス有の場合、取付不可。(バスリフト座面前方のクリアランスが800mm以下になるため。)

※7: ハンドグリップに干渉するため設置不可。

※8: 設置は可能ですが、ヒカルリモコンの操作がしづらくなります。

※11: サポートバー全幅タイプ(基本仕様)は設置不可。

※14: ワンプッシュ排水栓の操作部と干渉するため設置不可。

※15: 排水栓と干渉して傷つく可能性があるため、シート用スペーサー(EW39006R)を取り付けてください。

※16: ステップ部にシートが乗り上げた場合に、浴槽を傷つけるおそれがあるため、背当てボード(EWBP106)とセットで使用してください。

※17: バスリフト使用時は追いだき機能を切ってください。

※18: ステップ側に設置するためステップは使用できません。