

シリーズ	浴室 サイズ	浴槽	設置位置	バスリフト (EWB100RN) 設置可否	アームレスト 乗越えキット品番 (別手配)	セレクト・オプションとの設置可否					
						ハンド グリップ	バス 水栓	サポートバー (Fタイプ)	追いだき加工	ヒカル リモコン	ワンプッシュ 排水栓
WY WT WG(廃番) WF(廃番)	1116	ラウンド浴槽	背側	○※1	EWBP108S	×※7	○	-	○	△※8	△※15
	1218/1216	ゆるりラ浴槽	-	×※5	-	-					
		ラウンド浴槽	背側	○※1	EWBP108S	×※7	○	-	○	△※8	△※15
	1316/1317/1318	ゆるりラ浴槽	ヘッドレストなし側	○	不要	×※7	○	-	△※17	△※8	×※14
		ラウンド浴槽	背側	○※2	EWBP108S	×※7	○	-	○	△※8	○
	1416/1418	ゆるりラ浴槽	ヘッドレストなし側	○※16※18	不要	×※7	○	-	△※17	○	△※15
		ラウンド浴槽	ステップなし側	△※3※12	EWBP108S	×※7	△※10	△※11	○	△※9	○
1616/1620	ゆるりラ浴槽	ヘッドレストなし側	○※16※18	不要	×※7	○	-	△※17	○	△※15	
1616/1620	ラウンド浴槽	ステップなし側	○※4※12	EWBP108S	○	△※10	○※13	○	△※9	○	
WB	1115/1116 /1117/1118	新薊形浴槽	-	×※5	-	-					
		楕円形浴槽	-	○	EWBP107R	×※7	-	-	○	△※8	○
	1216/1218	新薊形浴槽 (浴槽サイズ1200)	-	○※6	EWBP107R	×※7	-	-	○	△※8	○
		新薊形浴槽 (浴槽サイズ1250)	-	○※6	EWBP107R	×※7	-	-	○	△※8	○
		楕円形浴槽	-	○	EWBP107R	×※7	-	-	○	△※8	○
	1316/1317 /1318	新薊形浴槽	-	○	EWBP107R	×※7	-	-	○	△※8	○
		楕円形浴槽	-	○	EWBP107R	○	-	-	○	△※8	○
	1416/1418	新薊形浴槽	-	○	EWBP107R	○	-	-	○	△※8	○
		楕円形浴槽	-	○	EWBP107R	○	-	-	○	△※8	○

※1:入浴スペースが確保できないため脚側には設置不可。

※2:本体が前方にずれて落下する恐れがあるため脚側には設置不可。

※3:ステップまでの距離が短いため、身体状況によっては使いにくい場合があります。バスリフトの設置前提で浴室を選定する場合は、他の浴室をおすすめいたします。  
また、別売のシート用スパーサー(品番:EW39006R、希望小売価格:¥2,800)が必要です。(シートのガタツキを解消するため)  
Fタイプはサポートバーベンチ幅タイプをセレクトの場合のみ設置可能です。

※4:背当てボード設置不可。

※5:バスリフト座面前方のクリアランスが800mm以下のため。

※6:ワンプッシュ排水栓側には取付不可。またブローバス有の場合、取付不可。(バスリフト座面前方のクリアランスが800mm以下になるため。)

※7:ハンドグリップに干渉するため設置不可。

※8:設置は可能ですが、ヒカルリモコンの操作がしづらくなります。

※9:設置は可能ですがFタイプ以外はヒカルリモコンありの場合、ヒカルリモコンの操作がしづらくなります。

※10:Fタイプ(ステップなし側にバス水栓を設置)は設置不可。

※11:サポートバー全幅タイプ(基本仕様)は設置不可。

※12:Fタイプの場合、ベンチカウンターと干渉するため、トランスファーボード(EWB200R)は併用できません。

※13:Fタイプの場合、カバークッションの着脱がしづらくなるためサポートバーはベンチ幅タイプをおすすめします。

※14:ワンプッシュ排水栓の操作部と干渉するため設置不可。

※15:排水栓と干渉して傷つく可能性があるため、シート用スパーサー(EW39006R)を取り付けてください。

※16:ステップ部にシートが乗り上げた場合に、浴槽を傷つけるおそれがあるため、背当てボード(EWBP106)とセットで使用してください。

※17:バスリフト使用時は追いだき機能を切ってください。

※18:ステップ側に設置するためステップは使用できません。