


まずは設置できるか確認してみましょう！ バスリフト・チェックリスト

こんな種類の
浴槽には
設置
できません！

首もたれ(ヘッドレスト)付浴槽

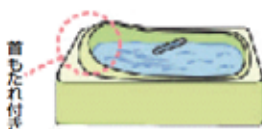

バスリフトを浴槽の上に置けません。

底から泡が出る浴槽



シートと泡の放出し口が干渉します。

丸型・大型浴槽



浴槽寸法が下記数値に
当てはまらない場合があります。

24時間保温浴槽





過度な高温多湿な室内では内部
機器に支障が出る場合があります。


浴槽の寸法が以下の数値に
当てはまらないと
設置できません！

設置可能な浴槽幅寸法表

D(mm)	B最小(mm)	B最大(mm)
25	585	705
30	580	700
35	575	695
40	570	690
45	565	685
50以上	560	680

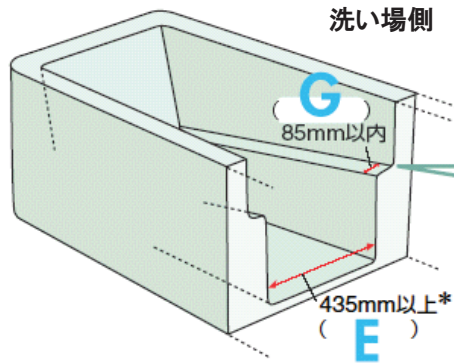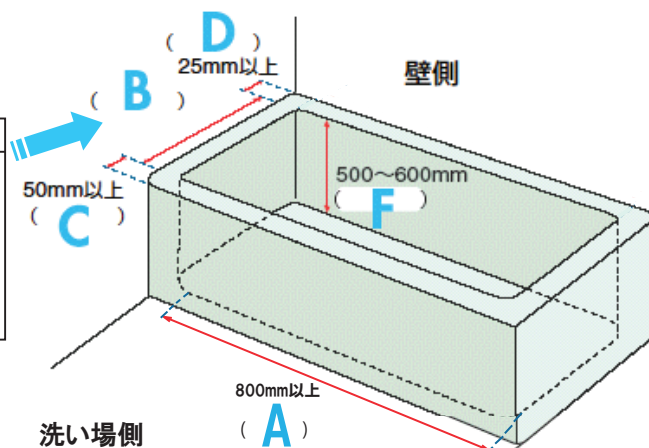

*ワイドシートの
場合は485mm以上

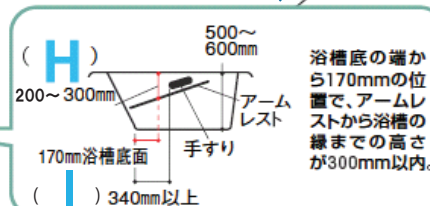

浴槽底の端から170mmの位置で、アームレストから浴槽の縁までの高さが300mm以内。


アームレストのある浴槽は
ご注意ください！

浴槽内にアームレスト(段差)がある場合は、「アームレスト乗越えキット」(オプション・別売)が必要です。ただし、アームレストの幅が85mm以上
の場合は、キットでも対応できません。

↓次の順番で
サイズを測定してください

測定部	設置可能サイズ*	測定値
A	800mm以上	
B	設置可能な 浴槽幅寸法表 を確認ください。	
C	50mm以上	
D	25mm以上	
E	435mm以上 ワイドシートは 485mm以上	
F	500~600mm	
G	85mm以内	
H	200~300mm	
I	340mm以上	
J	110mm以上	
K	300mm以上	
L	150mm以上	

手すりの設置条件

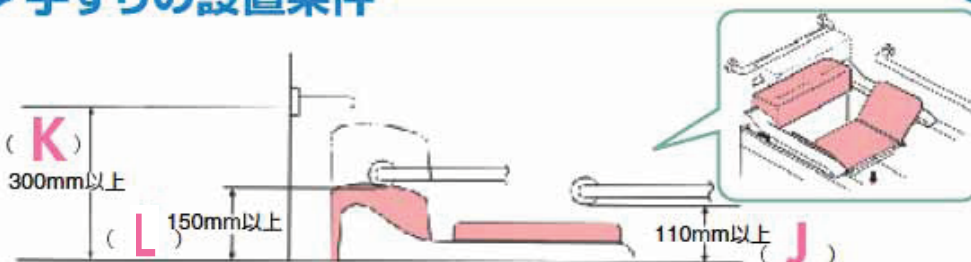

※チェックリストはあくまでも目安です。