

TOTO

取扱説明書 保証書付き

水まわり用車いす用シート

 EWCP600R
 EWCP604R


■ このたびは、TOTO水まわり用車いす用シートをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保存しておいてください。


安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、表示をしています。ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に保存してください。

表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。


 **必ず実行していただく「強制」内容です。**

⚠ 注意

 **必ず実行**


シートがしっかりと固定されているか確認して使用すること。

シートが外れ、落下転倒してけがをすることがあります。

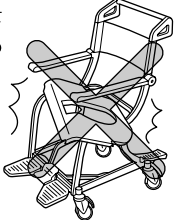


取り付けかた

① シートの端部を車いす座面後方フレームにあわせませす。

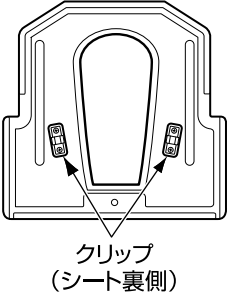

② **パチン** 座面フレームにシートを平らに置き、上から軽く押しつけます。

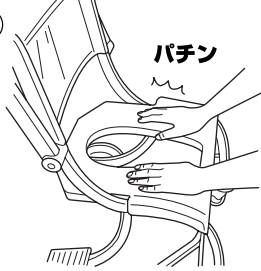

※2カ所のクリップが座面フレームにパチンとはまるまで押しつけてください。

ご注意：位置がずれたまま強く押しつけるとクリップが破損するおそれがあります。

お手入れのしかた

- 通常は、柔らかい布などで水ぶきしてください。汚れがひどいときは、適量にうすめた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、水ぶきしてください。消毒は、逆性せっけんを適量にうすめて使用してください。
- トイレ用洗剤、酸性・アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーおよびクレンザー、たわしなどの使用は、本体を傷めますので、絶対にやめてください。
- シートは着脱式ですので取り外して洗えます。
- 直接熱湯をかけて洗わないでください。
- いつもぬれているとカビが発生しやすくなりますので、シャワー浴のあとは乾いた布で水分を十分にふき取って乾燥させてください。

仕様

品番	EWCP600	寸法	幅450×奥行436.5×シート厚41.5	材質	発泡ウレタン	カラー	ハーベストブラウン
	EWCP604		幅450×奥行440 ×シート厚53.5		発泡ウレタン		ハーベストブラウン

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株) (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ 〒	
販売店	〒	印
	電話	—
取付日/ご購入日	年	月 日

商品名	スタンダードシート ソフトシート
品番	EWCP600R EWCP604R
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年
保証用途	家庭用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、ご購入日、販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、販売店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してある販売店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。
 - 商品の凍結による故障および損傷。
 - 温泉水、異常水質による故障および損傷。
 - 家庭用途以外(例えば施設や病院など業務用途での長時間使用)に使用された場合の故障および損傷。
 - 砂やごみかみによる不具合、消耗品の損耗。
 - 樹脂の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお客様名・ご購入日・販売店名、扱者印の記入のない場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は TOTOメンテナンス(株)へ
365日修理対応

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受付(年中無休)
受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00
：上記以外の地区 9:00~20:00

訪問修理(年中無休)
営業時間： 9:00~18:00

補修用部品のご購入はTOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

【お客様の個人情報のお取り扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細は、TOTOホームページ (<http://www.toto.co.jp/>) をご覧ください。

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>