

# TOTO

東陶機器株式会社

## バスリフト EWB100

# TOTO

## 取扱説明書

保証書付

製品の品質はTOTOお客様相談室へ

**0120-03-1010**

受付時間 平日 9:00～18:00  
土・日・祝日 10:00～18:00  
（お問い合わせ・保証書の発行を除く）

アフターサービスについての情報は専用ダイヤルへ

**0120-1010-05**

受付時間 18:00～20:00  
土・日・祝日 10:00～20:00  
（お問い合わせを除く）


交換部品についての情報はTOTOサービスセンター

**0120-8282-55**

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日を除く）

〒802-8501 北九州市小倉北区中島2-1-1……………ビル電話受付台 (093) 951-2111

1999.10.1  
EWO6061

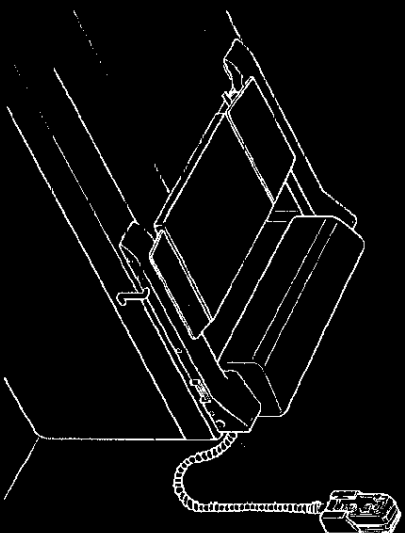

■このたびは、TOTOバスリフトをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
■この説明書は、大切に保存しておいてください。

目次


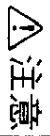
安全上の注意	2～4	お手入れのしかた	20～21
運送説明	5～6	シート取外し・取のり方	22
お取付の前に	7～8	どうしてかな？（修理を依頼される前に）	23
取付方	9～15	アフターサービスについて	24
取付點	16～17	製品仕様	25
使い方	18～19	無料修理保証書	27

# 安全上の注意



## ●安全のために必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。

この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろの表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。





表 示	意 味
	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が死にまたは重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。





表 示	意 味
	してはいけない「禁止」内容を伝えるものです。
	必ず実行していただく「強制」内容を伝えるものです。

専用の充電器、電池の取扱説明書及び本体の注意表示にも沿ってお使いください。取扱いを誤ると思わぬ事故や故障の原因となります。






## ●お取付けの際の注意

 警告	
	禁止 充電器を浴室内に持ちこんで充電しないでください。 感電や火災のおそれがあります。
	必ず実行 バスユニットはお使いの浴槽に合わせて幅調整が必要です。幅別に幅調整を行ってください。 使用中にバスユニットが転落し、ケガをしたり浴槽を破損するおそれがあります。
	必ず実行 固定金具は確実に取付けてください。 使用中にバスユニットが転落し、ケガをしたり浴槽を破損するおそれがあります。

## 注意

	必ず実行 バスユニットを持ち運ぶ場合は、足元や手、バスユニットの水気をかき取ってから行ってください。 誤ってバスユニットを取り落とすとケガをしたり、バスユニットや浴槽を破損するおそれがあります。
	必ず実行 バスユニット本体を浴槽に載せる際は、浴室壁面とフレームの間に手や指をはさまないように注意してください。
	禁止 幅調整のねじを締めつけ過ぎないでください。 浴槽を破損するおそれがあります。
	禁止 固定金具の締め付けねじは締めつけ過ぎないでください。また、工具は使用しないでください。 浴槽を破損するおそれがあります。

## ●試運転・ご使用の際の注意

 警告	
	禁止 充電器を浴室内に持ちこんで充電しないでください。 感電や火災のおそれがあります。
	必ず実行 ご使用の前にはシートが確実に取付けられていることを確認してください。 取付けが不十分だと使用中にシートが外れ、濡れたりケガをする恐れがあります。
	必ず実行 小さなお子様のいたずらなどに注意してください。 頭や腕などをはさまれ、濡れたりケガをするおそれがあります。 使用しない時は電池を取出しておくと安全です。
	必ず実行 ご使用にならぬ時や、お手入れの前には電池を取出してください。 誤動作により、手などははさまれおそれがあります。 取外した電池は浴室外の湿気のない場所に保管してください。

## 商品説明

●特長  
 浴槽への出入りを補助するために、シートを上下にさせる電動式の入浴リフトです。手元のリモコンスイッチを操作するとシートが昇降します。

### 特長 1

脱浴の浴槽（在来、システムバス）に手を加えることなく、設置できます。  
 電源工事也不要です。

### 特長 2

自然なスピードでシートが上下し、浴槽内での立ち座りをサポートします。

### 特長 3

シートは最上位置では、洗い槽側に近付き、浴槽への出入りをサポートします。

### 特長 4

リモコンスイッチなので手元で操作できます。

### 特長 5

シートは着脱式ですので、バスリフトをお使いにならない際にはシートを取り外して入浴して頂けます。

## ⚠ 注意



禁止

バスリフトはシートが上下に昇降しますので、バスリフトの上に物を置いたり、たてかけたりしないでください。  
 物が落ちるなどして、ケガをするおそれがあります。



禁止

バスリフトを自分で分解・修理・改造しないでください。  
 思わぬ事故によりケガをするおそれがあります。

### ●お手入れの際の注意

## ⚠ 警告



必ず実行

ご使用にならない時や、お手入れの前には電池を取り外してください。  
 誤動作により、手などをはくむ恐れがあります。  
 取外した電池は浴室外の湿気の少ない場所に保管してください。

# お取付けの前に

## 1 バスユニットをお取付けになる浴槽を確認してください。



### ■浴槽の種類について

- お取付けできる浴槽 ……和風バス、和洋折衷バス
- ×お取付けできない浴槽 ……洋風バス、スーパーエグゼレントバス等の特殊な形状の浴槽

- 浴槽の形状・寸法について ……下図の条件に当てはまる浴槽

浴槽内法の長さ800mmの場合、バスユニットに疊った際のひさぎの空気が狭くなり、ご使用される方の状態によっては使用に適さない場合もありますので、十分ご注意ください。


アームレスト付浴槽の場合、別売オプション品のアームレスト 乗越スキット (EWBP100) が必要です。

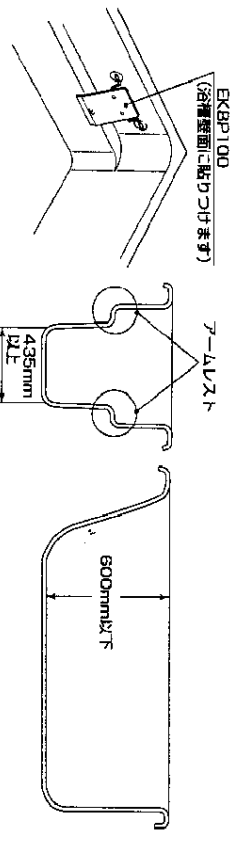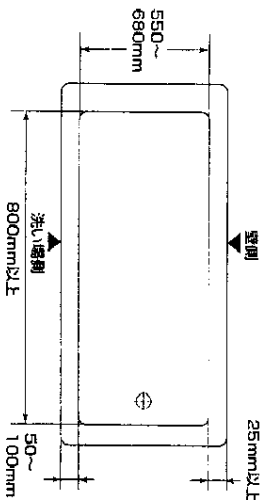

×お取付けできない浴槽 ……上図の条件に当てはまらない浴槽、ヘッドレスト付浴槽、エアフロー機能付浴槽


### ■手すりの設置について

- 浴室に手すりを設置する場合、設置位置にご注意ください。
- ①浴槽上端より100mm以上離してください。
- ②浴槽壁より150mm以上離してください。

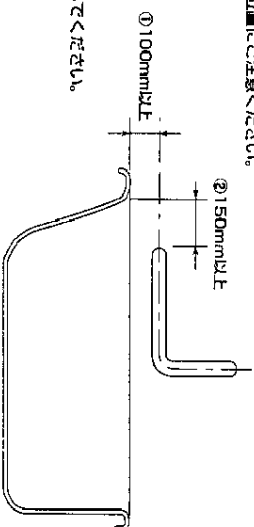

■その他のご注意  
60℃以上の高温で使用、保管しないでください。  
故障の原因となります。

## ●各部の名前

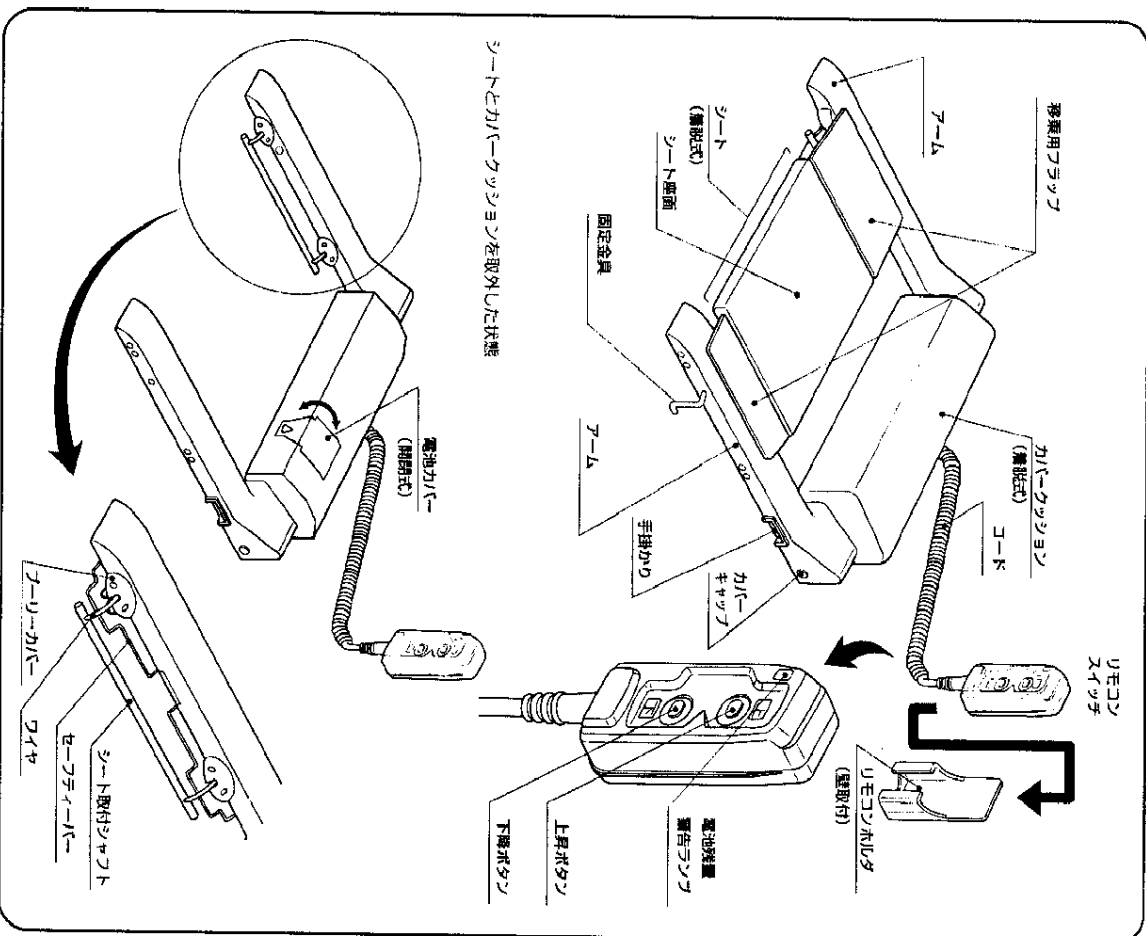

シートとカバーキャップを取外した状態

# 取付け方

## 2 梱包内容を確認してください。

箱の中には以下の物が入っています。

名称	品番	数量	形状
バスユニット取扱説明書	EM06061	1冊	バスユニット
バスユニット本体	EW21040	1台	バスユニット
シート	EW21040	1台	バスユニット
名称	品番	数量	形状
ブラケット 小	EW41020	1ヶ	この冊子です。
ブラケット 大	EW41021	1ヶ	この冊子です。
クリップ	EM55001	3ヶ	クリップ
固定金具セット	EW28003	1セット	固定金具×1ヶ 納付ねじ×1ヶ
名称	品番	数量	形状
カバーシート	EM59015	1枚	カバーシート
充電器取扱説明書	—	1冊	日立工機 日立急速充電器 充電器と同梱
充電器	EW79001	1台	充電器
電池	EW79002	1ヶ	電池

## 1 まず充電を！

**警告**



充電器を浴槽内に持ち込んで充電しないでください。感電や火災のおそれがあります。

指定の電池以外のご使用にならないでください。故障の原因となります。バスユニットは充電商品です。充電器に付属の取扱説明書をよくお読みの上、まず電池を充電してください。(充電時間は約45分です)

## 2 バスユニット本体を浴槽に設置します。

**注意**



バスユニットを持ち運ぶ場合は、足元や手、バスユニットの水気を必ず取ってから行ってください。誤ってバスユニットを取り落とすとケガをしたり、バスユニットや浴槽を破損するおそれがあります。

**注意**




バスユニット本体を浴槽に載せる際は、浴室壁面とアームの間に手や指をはさまないように注意してください。

バスユニットを浴槽に設置する場合は、浴槽の水を抜いてから行ってください。誤ってバスユニットを取り落とし、水没させると、故障の原因になります。


バスユニットには、左右両側に手掛かりが付いています。この手掛かりにしっかりと指を掛けて持ち上げてください。バスユニット本体の重さは約15kgです。誤って取り落とさないように十分ご注意ください。

バスユニット本体を一人持ち運ぶ場合はカバークッションを前に向け、体を左右アームの間に入れるようにしてください。一人で持ち運ぶのが困難な場合は無理をせず、二人以上で持ち運んでください。

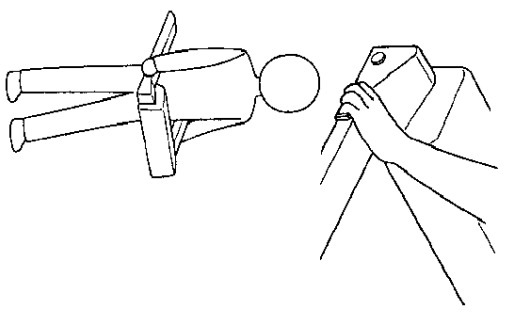


浴槽を横づけたいように注意しながら、バスユニット本体を浴槽の背もたれ側の三方のJHMにそって載せてください。  
ご使用になる方の状態などにより、反対側（浴槽正面）にバスユニットを取付ける場合は、



- ・水栓やシャワーヘッド
- ・バスアタッチター（追焚き湯出口）
- ・浴槽のソングッシュ排水栓の操作ボタンや給湯機のリモコンなどがないバスユニットをご使用になる方の体に当たらないか、また、問題なくこれら进行操作できるか十分にご確認ください。

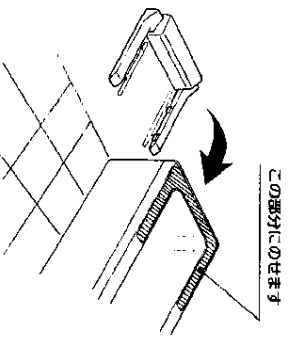

バスユニット本体を浴槽に載せる際は、浴室壁面とJHMの間  
に手や指をはさまないように注意してください。

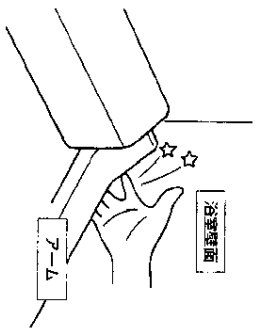

工場出荷の状態では、バスユニット本体の幅は最小に調整して  
あります。左右JHMのブローカーを浴槽内側に落とし込  
むむようにバスユニット本体の左右設置位置を調整してくださ  
い。

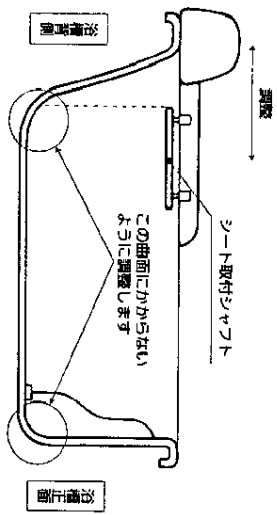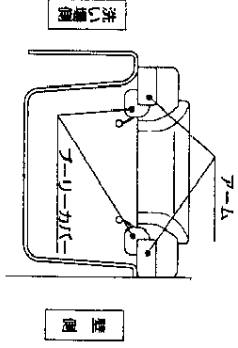


また、シートが浴槽底面まで下降した際に  
シート取付シャフトが浴槽の背もたれ側  
（または正面）曲面に干渉しないようにバス  
ユニット本体の前後設置位置も調整してくだ  
さい。

### 3 バスユニット本体の幅を調整します。



**警告** **必ず実行**  
バスユニットはお使いの浴槽に合わせて幅調整が必要です。確実に幅調整を行っ  
てください。  
使用時にバスユニットが転落し、ケガをしたら浴槽を破損するおそれがあります。

**注意** **禁止**  
幅調整のねじを締めつけ過ぎないでください。  
浴槽を破損するおそれがあります。


①バスユニット本体の幅調整穴（洗い場側）のカバ  
ーキャップを外し②ドライバーを挿し込みま  
す。

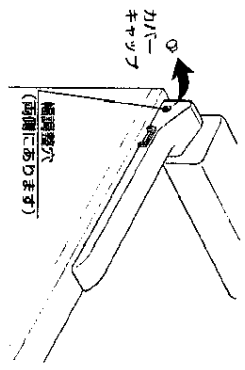

③ドライバーを回してバスユニット本体の幅を  
調整します。  
左右のブローカーが浴槽内側に接するよう  
に調整します。

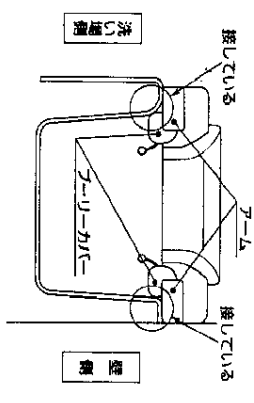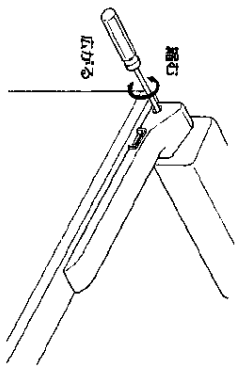

お使いの浴槽の壁側のJHM幅が狭くて壁側の  
ブローカーが浴槽内側に接するように調  
整できない場合は、壁側のJHMを壁面に接  
するよう調整してください。（洗い場側はブ  
ローカーが浴槽内側に接するようにし  
てください）

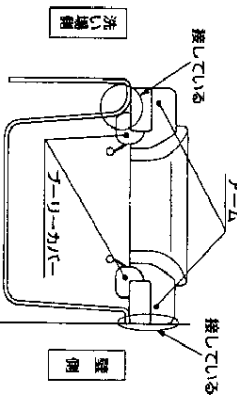

④ドライバーを抜き、カバーキャップをまた  
どおりにはめ込みます。

#### 4 浴槽固定金具を取付けます。


### 警告

**!** 固定金具は確実に取付けてください。使用中にバスタブが転倒し、ケガをしたりの浴槽を破損するおそれがあります。


### 注意

**禁止** 固定金具の締付けねじは締めつけ過ぎないでください。また、工具は使用しないでください。浴槽を破損するおそれがあります。


①固定金具を洗い場側から差し込みます。

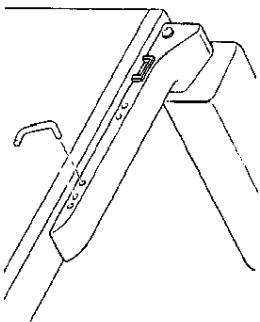

②浴槽内側から締付けねじで締め込みます。

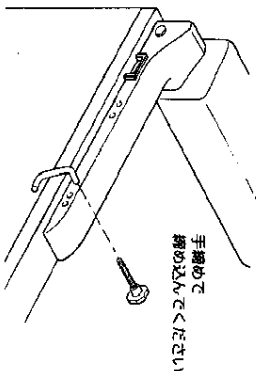


③使用しない穴をカバーシールでふさぎます。

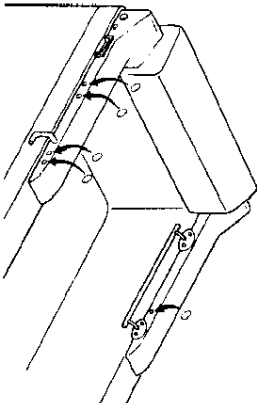


#### 5 シートに移乗用フックを取付けます。

バスタブの幅寸法によって使用するフックの大きさが異なります。取付けるフックを間違えないようにご注意ください。


○右図のA寸法が705mm未満の場合  
フックA (EW41020)を使用します。)

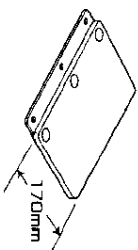


○右図のA寸法が705mm以上の場合  
フックB (EW41021)を使用します。

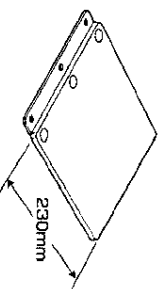

①シートにフックAのピンを挿し込みます。ピンを穴をフレームの穴での位置を合わせてクランプとフレームの間にピンをさし込んでください。

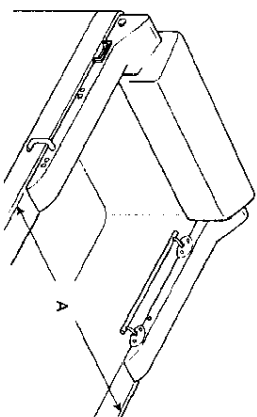


②ピンを固定します。フレームの上からクランプ (EW55001) を押し込み、ピンを固定してください。

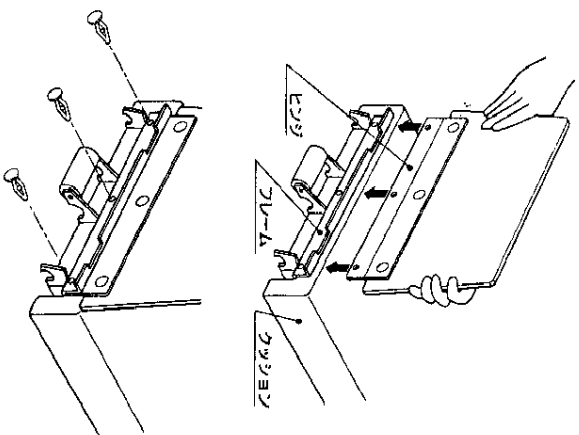

## 6 バスユニット本体にシートを取付けます。

移乗用フラップの短い方を洗い場側に向けてください。

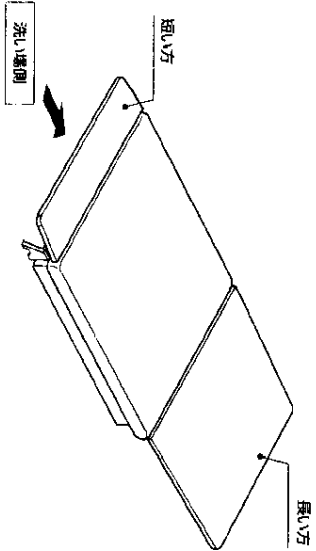


下移乗用フラップを踏ね上げます。

2 カラーとローラーの位置を合わせます。


3 シート取付けシャフトをシートの切り欠きに合わせてます。

4 「バチツツ」と音がするまでシート取付けシャフトを押し込みます。

5 反対側も同じ要領で取付けます。

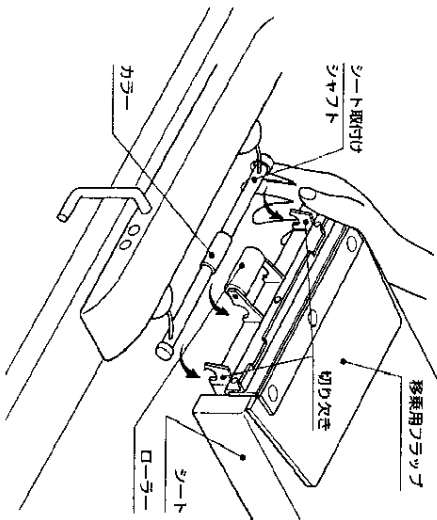

短いフラップの方が  
洗い場側になります。

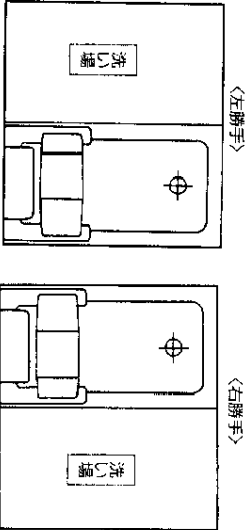


## 7 スイッチホルダーを取付けます。

リモコンスイッチは熱しく水のかかる場所に設置しないでください。  
故障の原因となります。

スイッチコードを折り曲げたり、無理に引っ張ったり、またスイッチコードの上に重い物を載せるなど、乱雑に扱わないでください。  
折線などの故障の原因となります。

スイッチホルダーの裏面には両面テープが貼ってあります。  
裏面の紙をはがして、水のかかりにくい位置に貼りつけてください。

スイッチホルダーを貼りつける壁面の高さは、浴槽の縁より400mm程度です。

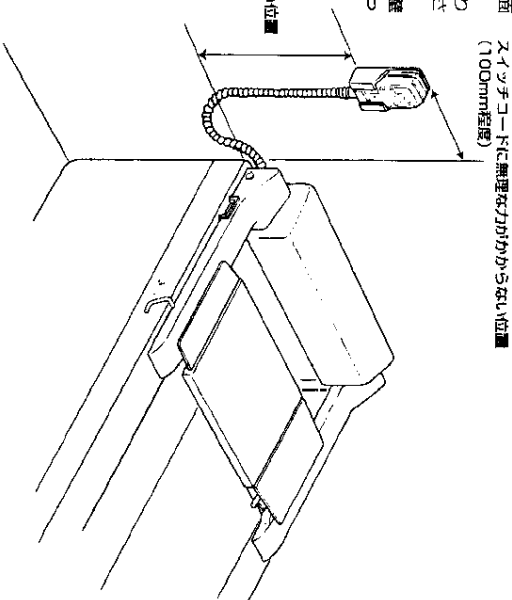

## 8 取付状態を確認します。

- バスユニットが斜めになっていたり、前後、左右にずれていませんか？
- 脚調整は正しくできていますか？浴槽には無理な力がかかっていませんか？
- 固定金具は確実に取付られていますか？浴槽には無理な力がかかっていませんか？
- 移乗用フラップは浴槽寸法に合った物が取付けられていますか？
- シートは正しい向きに、確実に取付けられていますか？
- スイッチホルダーは水のかかりにくい位置に取付けられていますか？
- スイッチコードには無理な力がかかっていませんか？




# 試運転

## 1 電池を取付けます。


指定の電池以外はご使用にならないでください。故障の原因となります。

①カバークッションを取外します。  
カバークッションはマシナリーで固定されています。  
カバークッションを持ち上げて取外します。

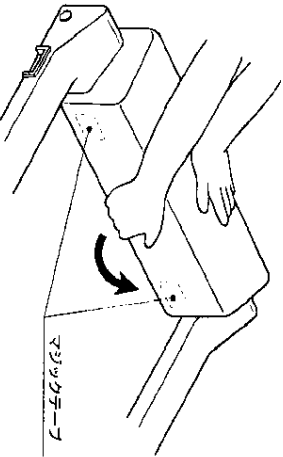


電池カバー

②電池カバーを開けます。

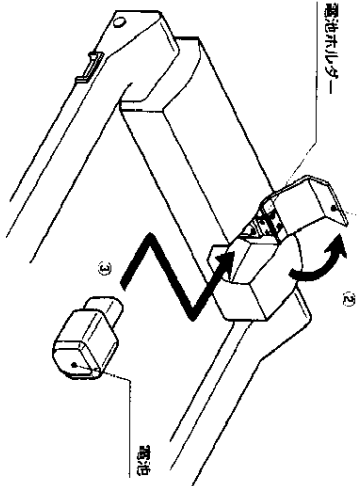


③電池の向きに注意して電池を電池ホルダーにさし込み、電池カバーを閉じます。

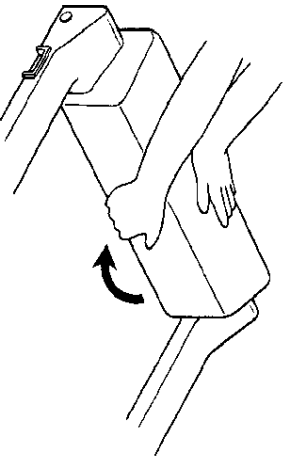

## 2 リモコンスイッチを操作します。

バスリフトには、シートに荷重がかかっている場合、リモコンスイッチを操作しても昇降しない安全装置が付いています。試運転の際は、シート座面中央を手で押さえるなどしながらリモコンスイッチを操作してください。


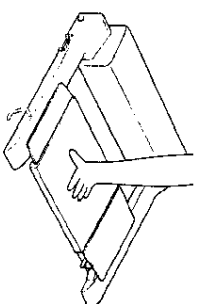


①青いボタンを操作します。

・青いボタンを押している間、シートは下がり続けます。  
・青いボタンを放せば、シートはその位置で止まります。  
・シートが浴槽底面まで下りると自動停止します。

②赤いボタンを操作します。

・赤いボタンを押している間、シートは上がり続けます。  
・赤いボタンを放せば、シートはその位置で止まります。  
・シートが最上位置（アームと座面が同じ高さ）まで上がると自動停止します。  
・浴槽底面近くでは、シートに荷重がかかっている状態でシートが上がりますが、これは故障ではありません。

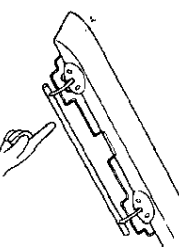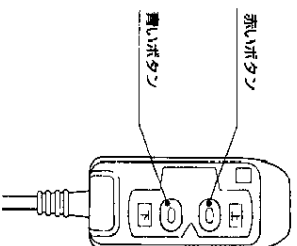

③セーフティカバーを押上げた状態で赤いボタンを操作します。  
バスリフトにはシートの上昇中にシートとアームとの間に手や指をはさみそうになった場合にシートの上昇を非常停止させるセーフティカバーが付いています。  
セーフティカバーを押している間、シートは上昇しません。

→「バスリフトが動かない!？」など、故障かな?と思われることがありましたら、修理を依頼される前にまずP23「どうしてかな? (修理を依頼される前に)」をよくお読みください。  
それでもなお、異常がある場合はP24「トラブルシューティング」をご参照の上、修理を依頼してください。

## 3 試運転が終わったら...



**警告**

**必ず実行**  
ご使用にならない時や、お手入れの前には電池を取外してください。  
誤動作により、手などを傷めおそれがあります。  
取外した電池は浴室外の湿気のない場所に保管してください。

試運転が終わりましたら、電池を取外しておいてください。  
P16「1 電池を取付けます」の手順にならって電池を取外してください。

# 使い方

## 1 電池を取付けます。


P16「試運転について」の「1 電池を取付けます」の手順に従って、バスユニットに電池を取付けます。

## 2 電池の残量を確認します。

電池残量が不十分（電池残量警告ランプが常時点灯）な状態では使用しないでください。シート昇降途中に電池切れで停止してしまうおそれがあります。


①リモコンスイッチの電池残量警告ランプが点灯しているら、リモコンスイッチのボタンを押さないで電池残量警告ランプから使用ください。（電池の充電方法は、充電器に付属の取扱説明書をご覧ください）

②シートを手で押しながら、リモコンスイッチの古いボタンを押します。シートが下がりますれば電池残量は十分です。電池残量が空の場合は電池残量警告ランプは点灯しません。また、リモコンスイッチのボタンを操作している間だけ電池残量警告ランプが点灯することがありますが、これは故障ではありません。

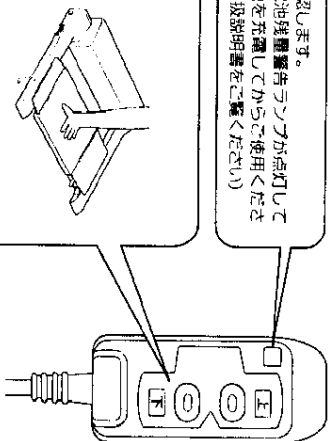

## 3 バスユニットのシートに座ります。

バスユニットの上に立ち上がり、バスユニット本体のカバークッションに腰かけないでください。  
破損や故障の原因となります。  
シート座面の中央に座ってください。  
シートが昇降する間は座面姿勢にならないように注意してください。  
介助する方が付き添う場合は、シートの昇降中はご使用になる方の背中に手を添えるなどして姿勢が崩れないように注意してください。

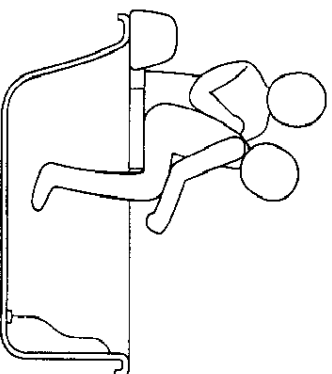


## 4 リモコンスイッチを操作します。

バスユニットには、シートに荷重がかかっていない場合はシートが昇降しない安全装置が付いています。

赤いボタン…シートが上がります。  
・ボタンを押している間、シートは上がり続け、ボタンを放せば、その位置でシートは止まります。  
・シートが最上位位置（フームと座面が同じ高さ）まで上がると自動停止します。

青いボタン…シートが下がります。  
・ボタンを押している間、シートは下がり続け、ボタンを放せば、その位置でシートは止まります。  
・シートが浴槽座面まで下がると自動停止します。

バスユニットをご使用の際はクイックを把んだり、シートを降さないようにしてください。この状態でシートを上昇させますと、センサーエラーが作動し、シートが最上位位置まで上昇せずに停止してしまいます。

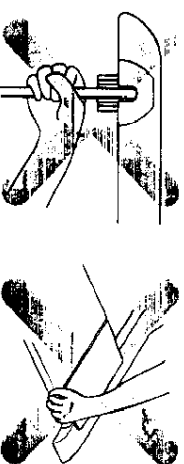

## 5 使用が済んだら…

**警告**  
必ず実行  
ご使用にならない時や、お手入れの前には電池を取外してください。誤動作により、手などをばさむおそれがあります。  
取外した電池は浴室外の湿気のない場所に保管してください。

ご使用が済んだら、電池を取外しておいてください。  
P16「試運転について」の「1 電池を取付けます」の手順にならって電池を取外してください。  
バスユニットをお取付けされると、組合わせまたはご使用できません。また、シャッター式ふるふたの場合も、わずかにすぎ間ができます。

# お手入れのしかた

## パソコン本体のお手入れ

**警告** **必ず実行**

ご使用にならない時や、お手入れの前には電池を取り外してください。  
誤動作により、手などをばさむおそれがあります。  
取外した電池は浴室外の湿気のない場所に保管してください。


パソコン本体のクッションカバーを取外した状態ではパソコンに水や洗剤をかけないでください。  
故障の原因となります。

リモコンスイッチは、激しく水のかかる場所に設置しないでください。  
故障の原因となります。

汚れは、かたく絞った布でふき取ってください。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性剤を含ませた布でふき取ってください。

「酸性」・「アルカリ性」の表示のある洗剤やシンナー、ベンジン、クレンジー、及びたわしやネット付スポンジなどは製品表面を傷つけますので、絶対に使用しないでください。

また、60°C以上のお湯をかけますと、樹脂部品が変形するおそれがあります。お湯をかける場合はぬるま湯にしてください。

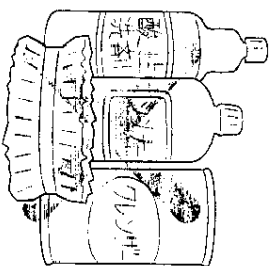

## バッテリーパック、充電器のお手入れ

バッテリーパック、充電器のお手入れについては、充電器の取扱説明書に従って正しくお手入れしてください。

## バッテリーリサイクルのお願い



NI-Cd

ニカドバッテリー  
リサイクルマーク

パソコンに使用している電池（ニカドバッテリー）はリサイクルできる貴重な資源です。ご使用済みの電池は、送料着払いにて、下記までご送付ください。

※お送りいただく際は、金属類や他の電池をまぜないでください。

受付機器部 TOTO/ケーケンター


〒802-0073

福岡県北九州市小倉北区真船町2-2 TEL.0120-8282-55

# シートの取外し、取付け方


## シートの取外し方

シートの左右両側のシートを取外します。  
 フラップを跳ね上げ、シートにクラップされている  
 シートを取外しします。(下の方に押し込まれます)  
 反対側を同じ要領で取外します。

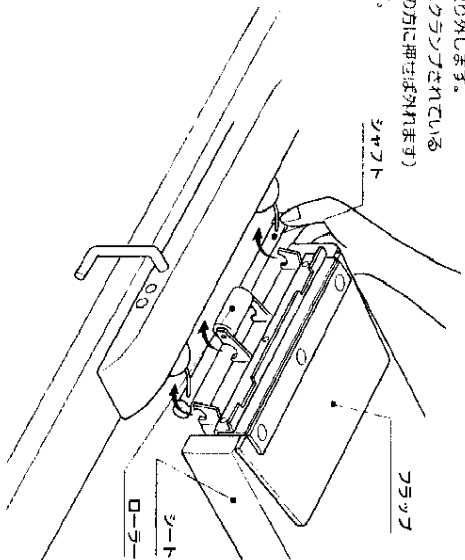

## シートの取付け方

- ① 移乗用フラップを跳ね上げます。
- ② カローラとローラーの位置を合わせます。
- ③ シート取付けシートをシートの切り欠きに合わせてます。
- ④ 「(チズン)」と音がするまでシート取付けシートを押し込みます。
- ⑤ 反対側も同じ要領で取り付けます。

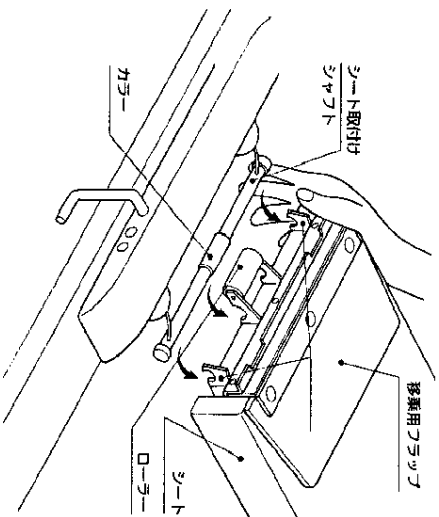

# どうしてかな？(修理を依頼される前に)

「リアシートが動かない!？」など故障かな?と思われることがあります。修理を依頼される前に、このページをよくお読みください。  
 それでもなお異常がある場合は、P24「リアシートについて」をご参照の上、修理を依頼してください。

このような時は	処理・確認のしかた
スイッチのボタンを押してもシートが昇降しない。  十分に充電された(バッテリー/バッタクを使用しても)に(バッテリー)残量警告ランプが点灯する。	・電池が取付けられていますか? ・電池は十分に充電されていますか? (バッテリー残量警告ランプは電池の残量が0になると点灯します) ・リアシートには安全装置が付いています。シートに何も載っていない状態で、スイッチのボタンを操作してもシートは昇降しません。  ・リアシートの昇降回数の目安は、1回のフル充電で約20往復程度(使用者の体重50kgの場合)です。昇降回数が著しく低下した場合は、電池の寿命が考えられます。新しい電池をお買い求めください。 ・電池の寿命の目安は充電回数で約1000回です。

# アタナーサービスについて

修理を依頼される前にP23の「どうしてかな? (修理を依頼される前に)」をお読みのうえ、もう一度ご確認ください。ご要望に応じて不明な点がある場合、修理を依頼される場合、交換部品をお求めの場合は、下記へお問い合わせください。

## お問い合わせ先

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

**0120-03-1010**

受付時間 平日 9:00~18:00  
土・日・祝日 10:00~18:00  
(夏期休暇・年末年始を除く)

商品についての性能や  
ご不明な点がある場合

アタナーサービスについてのご用命は東陶メンテナンスへ  
**0120-1010-05 (年中無休)**

受付時間 関東甲信越地区 8:00~20:00  
上記以外の地区 9:00~20:00

交換部品のお求めは

交換部品についてのご用命はTOTO/ベッツセンターへ  
**0120-8282-55**  
受付時間 9:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

交換部品	品名	品番
	交換用電池	EW79002

## 他の充電器・電池のご使用について

バテリットには、以下の日立工機株式会社製の充電器、電池を使用することもできます。お求めの際は最寄りの日立工機販売店にてお問い合わせください。

充電器：品番 UC 14YC (これらの品番は1999年10月時点のものです)  
電池：品番 EB 12B

バテリット付属の充電器、電池との比較

充電時間	充電器		連続運転回数 (60℃/何回)
	EW79001 (バテリット付属品)	UC 14YC (日立工機株式会社製)	
約45分	約45分	約9分	約20回の昇降
約12B (日立工機株式会社製)	約50分	約14分	約30回の昇降

# 製品仕様


用途	入浴用リフト	
名称	バテリット	
品番	EWB100	
外形寸法	幅645×奥行575mm×高さ150mm	
製品質量	19kg (本体のみ) 14.7kg、シート部: 4.3kg)	
スイッチコード長さ	スリッパ用コード長さ: 300mm (最大長: 840mm)	
使用環境	0~60℃ (凍結防止)、90%RH以下	
昇降方式	シートに取付けられたワイヤを繰りだし、巻き取ることでより昇降	
昇降音	60dB (距離1m)	
本体防水仕様	JIS3級 防雨形相当	
種数	充電式ニカド電池 12V・1200mAh	
連続運転回数	1回充電 60kg荷重時で約20回の昇降	
電池寿命	充電回数で約1000回	
充電時間	約45分	

充電器の仕様については、充電器に付属の取扱説明書をご覧ください。

## トランスフナーボード (樹脂タイプ) との組合せについて

バテリットはトランスフナーボード (樹脂タイプ) と組合わせると、バテリットへの取り付けが便利になります。バテリットにトランスフナーボード (樹脂タイプ) を取付ける場合は、トランスフナーボードの他にバテリット接続キットが必要ですので併せてお問い合わせください。

品名	品番
トランスフナーボード (樹脂タイプ)	EWB200
バテリット接続キット	EWBP200

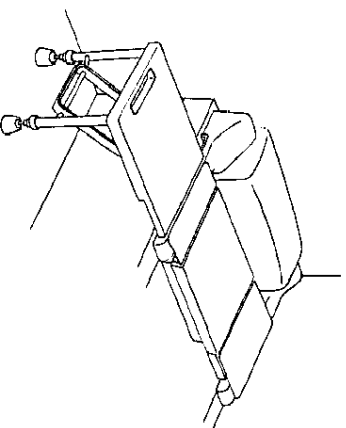

# TOTO

## 無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取付店又は東陶メンテナンス㈱に修理をご依頼ください。

お客様 お名前	様
お客様 おとこみ千	
お取付店名	印
お取付日	年 月 日

品番	EWB100
保証期間	本体 お取付日から1ヵ年

★お客様へ  
この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取付店名、抜者印が記入してあることを確認してください。保証書は角折行いまして人ので紛失されないよう大切に保存してください。

### <無料修理規定>

- 取扱説明書、貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店又は東陶メンテナンス㈱にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご同居の場合は事前にお取付店にご相談ください。
- ご障害品等で本保証書に記入してあるお取付店に修理ができない場合には、もよりの当社事業所にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - お取付後の移動等に起因する故障及び損傷。
  - ① 火災・地震・水害・落着、その他の天災地変、公営や異常高圧による故障及び損傷。
  - ② 指定外の燃料、電源（電圧・周波数）、不純燃料の使用及び異常水質による故障及び損傷。
  - ③ 砂やごみかみによる不具合及びバッテリー等消耗部品の損傷。
  - ④ 本書の提示がない場合。
  - ⑤ 本書にお客姓名、お取付店名、お取付日の記入のない場合、あるいは文字を書き替えられた場合。
  - ⑥ 施工上の不注意、過失による不具合。
  - ⑦ 本書は日本国内においてのみ有効です。
  - ⑧ 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

サービス記録	サービス内容	担当者
年 月 日		

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証書期間経過後の修理等について不明の場合は、もよりの当社事業所にお問合わせください。

## 東陶機器株式会社

〒902-8501 北ノ限町(旭地区)中2丁目1番11号 TEL:093(95)12111