

## バスリフト接続キット

EWBP200

トランスファーボード（樹脂タイプ）〈EWB200〉以外の機種にはセットできません。

### 安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための表示をしています。その表示と意味は次ようになっていきます。



**注意**

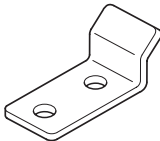
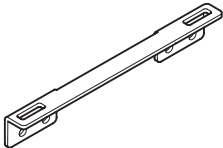

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



**注意**

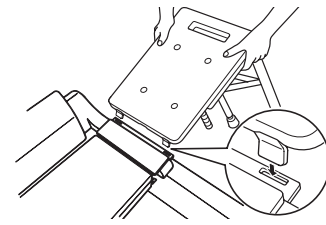
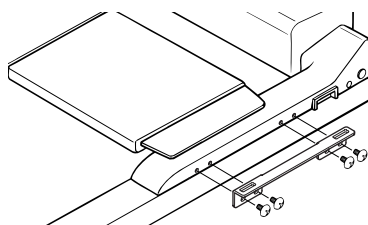
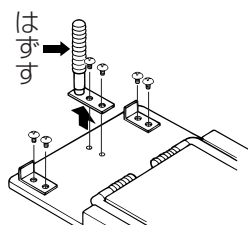
- フックは確実にトランスファーボードにビス止めしてください。（外れてけがをするおそれがあります。）
- フック受けは、バスリフトに確実にビス止めしてください。（外れてけがをするおそれがあります。）
- フックは、フック受けのスリットに確実ににはめ込んでください。（外れてけがをするおそれがあります。）

### 部品の名称

フック	フック受け	取付ビス
 ×2		 ×8

### 取付けかた

1. 座面中央部の固定フックをはずし、フックを座面裏面の所定（切欠部）位置にビス止めします。
2. バスリフト側面に付いているビス穴樹脂キャップをはずし、フック受けをバスリフト側面部にビス止めします。
3. トランスファーボードに取付けたフックをフック受けのスリット部にしっかりとはめ込みます。



**注意**

- ・フックを付けた状態では、フックが浴槽を傷つけるおそれがありますので取扱いには十分ご注意ください。
- ・（バスリフト接続キット用）フックを付けた状態で直接浴槽へトランスファーボードをセットすると、浴槽を傷つけるおそれがあります。浴槽へ直接セットする場合は、必ず固定フックに付けかえてください。

### お手入れのしかた

■適量に薄めた中性洗剤をしみ込ませた布またはスポンジで汚れを取り、水洗いした後乾いた布などで水分をきれいにふき取ってください。

■酸性・アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナーおよびクレンザー、たわしなどの使用は本体を傷めますので絶対にやめてください。

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

**TEL ☎0120-03-1010**  
**FAX ☎0120-03-1010**

受付時間：平日 9:00～18:00  
土・日・祝日 10:00～18:00  
（夏季休暇・年末年始を除く）

修理のご用命は TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

**TEL ☎0120-1010-05**  
**FAX ☎0120-1010-02**

受付：年中無休  
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00  
上記以外の地区 9:00～20:00  
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）  
営業時間： 9:00～18:00

【お客様の個人情報のお取り扱い】

お客様からお預りした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細は、TOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1  
TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>