

安全上の注意

■ 安全のために必ずお守りください。

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。



この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



バスリフトのワイヤは点検が必要な部品です。必ず定期的(1週間に1回程度)にワイヤの点検を行い、異常が見られる場合は、新品のワイヤに交換してからご使用ください。ワイヤが劣化した状態でご使用になりますと、ご使用中にワイヤが破断し、シートが落下する恐れがあります。

点検のしかた

- リモコンスイッチを操作してバスリフトのシートを浴槽底面まで下降させて、シートを取外します。
- 4本のワイヤに異常がないか点検します。
以下のような異常の有無を点検してください。
 - ワイヤの被覆(白いコーティング部)が裂けて心材のステンレスが露出していないか?
 - ワイヤ被覆(白いコーティング部)の表面に亀裂が発生していないか?
 - 錆が発生していないか?(ワイヤの心材にはステンレスを使用しておりますが、水質によっては、まれに錆が発生する場合があります)
 ①～③のいずれかの異常がある場合は、東陶メンテナンス㈱までワイヤ交換を依頼してください。

アフターサービスについてのご用命は東陶メンテナンス㈱へ



0120-1010-05 (年中無休)

受付時間 関東甲信越地区 8:00~20:00

上記以外の地区 9:00~20:00

- 点検が完了しましたらバスリフトのシートを取付け、リモコンスイッチを操作してシートを最上位置まで上昇させます。

商品のお問合わせはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間 平日 9:00~18:00

土・日・祝日 10:00~18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

本社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1ビル電話受付台 (093) 951-2111 2000.2

EW06072