

■このたびは、TOTO「シャワーチェア」をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■この説明書は、大切に保存しておいてください。

## 安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。

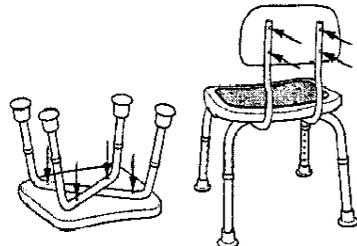
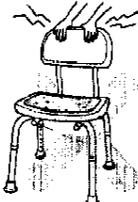
その表示と意味は次のようになっています。

<b>⚠ 注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
-------------	--

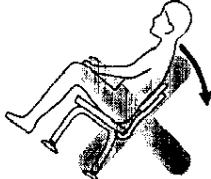
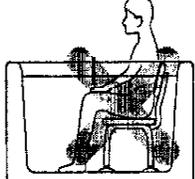
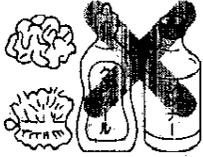
お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。

⊘	行ってはいけない「禁止」内容です。	!	必ず実行していただく「強制」内容です。
---	-------------------	---	---------------------

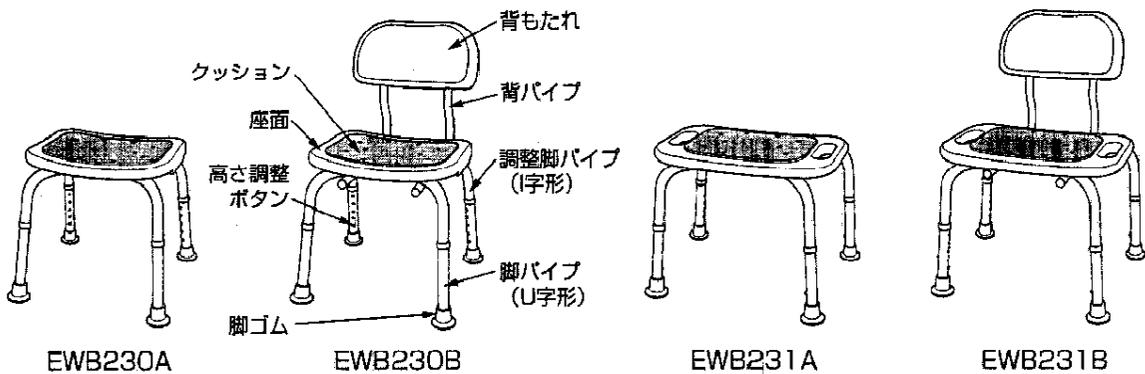
### ⚠ 注意

⊘ 禁止	体重が100kgを超える方は使用しないでください。本体が破損し、ケガをするおそれがあります。	⊘ 禁止	シャワーチェアに2人以上同時にのらないでください。転倒してケガをするおそれがあります。
⊘ 禁止	座面の上に立ったり、脚をかけたりしないでください。転倒してケガをするおそれがあります。 	⊘ 禁止	飛び乗らないでください。本体が倒れたり横滑りし、ケガをするおそれがあります。 
⊘ 禁止	故意にゆすらないでください。本体が倒れてケガをするおそれがあります。 	! 必ず実行	4脚とも同じ高さに調整してください。本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。 
! 必ず実行	高さ調整ボタンは確実に固定してください。本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。	! 必ず実行	パイプと座面・背もたれを固定しているねじがゆるんでいないか確認してください。ねじが緩んでいる時は、ドライバーでねじを締め付け直してください。ねじがはずれると、転倒してケガをするおそれがあります。 
! 必ず実行	脚ゴムが確実に取付けられていることを確認してください。脚ゴムが外れていると、滑りやすく、転倒してケガをするおそれがあります。また、浴室の床にキズがつく原因になります。	⊘ 禁止	背もたれを手すり替わりに持たないでください。転倒してケガをするおそれがあります。 

## ⚠️ 注意

<p>禁止</p> 	<p>上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに体重をかけすぎないでください。転倒してケガをするおそれがあります。</p> 	<p>必ず実行</p> 	<p>浴室床の平らで安定した場所に置いてご使用ください。不安定な場所に置くと、転倒してケガをするおそれがあります。</p>
<p>必ず実行</p> 	<p>ご使用前、ご使用後は床やチェアについた石鹸やシャンプーを洗い流してください。石鹸やシャンプーが着いていると、すべりやすく、転倒してケガをするおそれがあります。</p> 	<p>禁止</p> 	<p>シャワーチェアを水中に沈めて使用しないでください。パイプが腐食により破損し、ケガをするおそれがあります。</p> 
<p>禁止</p> 	<p>「カビキラー」等の塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒および、温泉水や「六〇ハップ」等の硫黄系の入浴剤をかけての使用は行わないでください。パイプが腐食により破損し、ケガをするおそれがあります。</p> 	<p>禁止</p> 	<p>タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等をご使用しないでください。塩素系洗剤・シンナー・クレゾール等をご使用しないでください。プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。</p> 

## 各部のなまえ

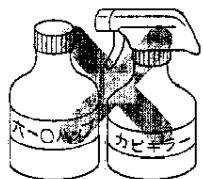
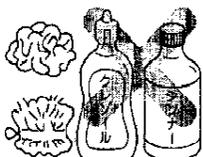


## お手入れのしかた

- シャワーチェアは常に清潔に保つように清掃してください。
- 適量にうすめた中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませ、汚れをきれいに拭き取ってください。きれいな水で洗剤を洗い流し、陰干しするか、乾いた布できれいに拭き取ってください。
- 直接熱い湯をかけて洗わないでください。クッションが変形することがあります。
- いつも濡れているとカビが発生しやすくなりますので、使用後は乾いた布で水分を拭き取ってください。



## ⚠️ 注意

<p>禁止</p> 	<p>「カビキラー」等の塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒および、温泉水や「六〇ハップ」等の硫黄系の入浴剤をかけての使用は行わないでください。パイプが腐食により破損し、ケガをするおそれがあります。</p> 	<p>禁止</p> 	<p>タワシや磨き粉、研磨剤入りスポンジ等をご使用しないでください。塩素系洗剤・シンナー・クレゾール等をご使用しないでください。プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。</p> 
--	--	---	--

# 使い方

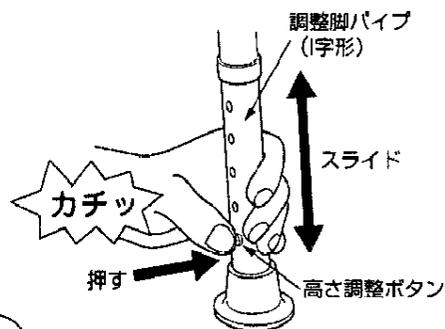
このシャワーチェアは浴室の洗い場でシャワーを浴びたり、体を洗ったりする際にご使用ください。

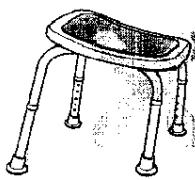
①身体状況などに合わせて、使いやすい高さに座面高さを調節してください。

座面高さは35~46cm (5段階) のあいだで高さ調整できます。

## 座面の高さ調整方法

- 高さ調整ボタンを押して、調整脚パイプ (I字形) をスライドさせてお好みの高さにあわせてください。
- 高さ調整ボタンが「カチッ」と音がして脚パイプの穴に確実に固定されていることを確認してください。
- 4脚とも同じ高さになるように他の脚も同様に高さ調整を行ってください。

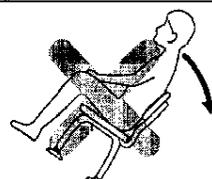
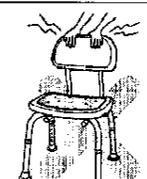


⚠️ 注意			
❗ 必ず実行	<p>4脚とも同じ高さに調整してください。本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。</p> 	❗ 必ず実行	<p>座面高さ調整ボタンは確実に固定してください。本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。</p>

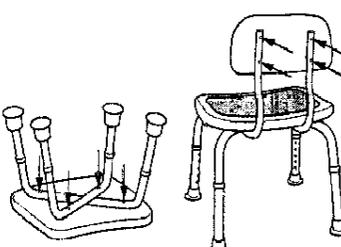
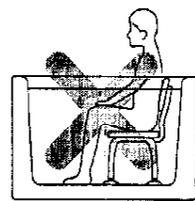
②浴室床の平らな場所に置いてください。

⚠️ 注意	
❗ 必ず実行	<p>浴室床の平らで安定した場所に置いてご使用ください。不安定な場所に置くと、転倒してケガをするおそれがあります。</p>

③シャワーチェアには深く腰掛けてください。

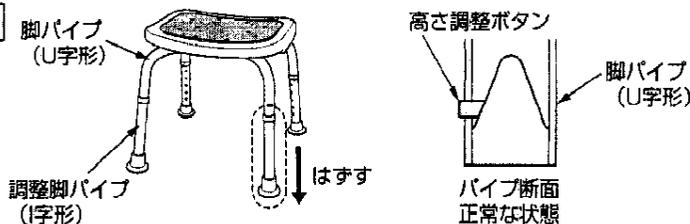
⚠️ 注意			
🚫 禁止	<p>上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに体重をかけすぎないでください。転倒してケガをするおそれがあります。</p> 	🚫 禁止	<p>背もたれを手すり替わりに持たないでください。転倒してケガをするおそれがあります。</p> 

④ご使用前に、お使いになる方に高さが使用者に合っているか、脚ががたついたり、傾いたりしていないか、再度ご確認ください。

⚠️ 注意			
❗ 必ず実行	<p>パイプと座面・背もたれを固定しているねじがゆるんでいないか確認してください。ねじが弛んでいる時は、ドライバーでねじを締め付け直してください。ねじが外れると、転倒してケガをするおそれがあります。</p> 	🚫 禁止	<p>シャワーチェアを水中に沈めて使用しないでください。パイプが腐食により破損し、ケガをするおそれがあります。</p> 

## 高さ調整ボタンがパイプの中に入りこんだ場合は…

1度調整脚パイプ (I字形) をはずし、高さ調整ボタンを脚パイプ (U字形) の穴に入れてください。



# アフターサービスについて

取替えクッションを用意しています。(品番：EW57017 メーカー希望小売価格 ￥900)

商品についてご不明な点がある場合、修理を依頼される場合、交換部品をお求めの場合は、下記までお申しつけください。

商品のお問い合わせはTOTOお客様相談室へ

 **0120-03-1010**  
 受付時間：平日 9:00～18:00  
 土・日・祝日 10:00～18:00  
 (夏期休暇・年末年始を除く)

修理についてのご用命は東陶メンテナンス㈱へ

 **0120-1010-05**  
 受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00  
 ；上記以外の地区 9:00～20:00

修理部品のご購入はTOTOパーツセンターへ

 **0120-8282-55**  
 受付時間：平日 9:00～18:00  
 土・日・祝日 10:00～18:00  
 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

# TOTO

## 無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、ご購入店又は東陶メンテナンス(株)に修理を依頼してください。

お客様	おなまえ	様
	おところ ㊦	
ご購入店名	㊦	
	tel	㊦
ご購入日	年	月 日

品番	EWB230A EWB230B EWB231A EWB231B	
保証期間	本体	ご購入日から2カ年

### ★お客さまへ

この保証書をお受け取りになるときに、ご購入年月日、ご購入店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱い説明書、貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、ご購入店又は東陶メンテナンス(株)にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にご購入店にご相談してください。
- ご贈答品等で本証明書に記入してあるご購入店に修理がご依頼できない場合には、もよりの当社事業所にご相談ください。
- 保証期間内でもつぎの場合には有料修理になります。
  - ㊦ 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ㊦ 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
  - ㊦ 異常水質による故障および損傷。
  - ㊦ 砂やごみかみによる不具合及びパッキン等消耗品の損傷。
  - ㊦ 本書の提示がない場合。
  - ㊦ 本書にお客様名、ご購入店名、ご購入日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - ㊦ クッションの損傷及び汚れ。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

### サービス記録

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、もよりの当社事業所にお問い合わせください。

# 東陶機器株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 TEL093(951)2111

2001.06  
EW06107