

TOTO

無料修理保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、ご購入店又は東陶メンテナンス側に修理を依頼してください。

お客様	お名前	姓	
	おとこ	名	
ご購入店	Tel	TEL	
		印	
ご購入日	年	月	日

品番	EWB232A EWB232B	
保証期間	本体	ご購入日から2年

※お客様へ
この保証書をお受け取りになるときに、ご購入年月日、ご購入店名、取扱印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。

【無料修理規定】

1. 取扱説明書、配付ラベル等の注意事項にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、修理の期間無料修理いたします。保証期間内に故障して無料修理を要する場合は、ご購入店又は東陶メンテナンス側にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
2. ご住所の場所はご購入店にご相談ください。
3. ご出張の場所はご購入店に修理ができない場合には、もよりの当社事業所にご相談ください。
4. ご出張料等でご保証書に記入してあるご購入店に修理ができない場合には、もよりの当社事業所にご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - ① 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② 火災・地震・水害・落物・その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
 - ③ 異常水質による故障及び損傷。
 - ④ 紛失・盗みかきによる不具合及びパソコン等消耗品の損傷。
6. 本書にお客様名、ご購入店名、ご購入日の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合、⑤パソコンの修理及び交換。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

年	月	日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等については不明の場合は、もよりの当社事業所にお問合わせください。

東陶機器株式会社

製品の名称や住所はTOTOお客様センターへ

0120-03-1010
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットサービス
0120-8282-55
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理についての問い合わせは東陶メンテナンスへ

0120-1010-05
受付時間：平日・土曜・日曜・地域別
受付時間：上記以外の地区 9:00～20:00
夜間受付（年中無休）
受付時間：9:00～18:00

お問い合わせ先
http://www.toto.co.jp/

東陶機器株式会社
〒2001-8
EW06123


本社 〒802-8601 北州市の巻北區中環2-1-1
(093) 951-2111

シャワーチェアエアーグリップ付 EWB232A、EWB232B

保証書付

東陶機器株式会社
購入済お客様

TOTO 取扱説明書

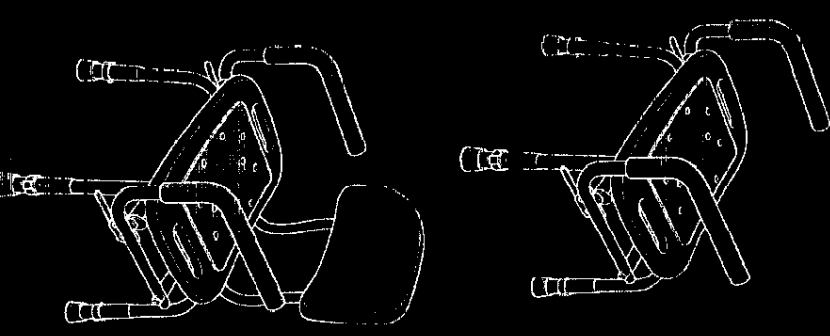

- このたびは、TOTO「シャワーチェア」をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - この説明書は、大切に保存して必要なお読みください。（取扱性に保証書が添付されております。）
- 安全上の注意

 - 2 各部のなまえ
 - 4 履座クッションの取り方
 - 4 使い方の
 - 5 お手入れのしかた
 - 7 製品仕様
 - 7 フラクターサービスについて
- 保証書

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上正しくお使いください。
この「取扱説明書」では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。その表示と意味は次のようになっていきます。

△注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損害のみが発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。

○ 行ってはいけない「禁止」内容です。
① 必ず実行していただく「強制」内容です。


△注意

○ 禁止	体重が100kgを超える方は使用しないでください。 本体が破損し、ケガをするおそれがあります。	○ 禁止	シャワーチェアに2人以上同時にのらないでください。 転倒してケガをするおそれがあります。
○ 禁止	座面の上にとったり、脚をかけたりしないでください。 転倒してケガをするおそれがあります。	○ 禁止	飛び乗らないでください。 本体が倒れたり横滑りし、ケガをするおそれがあります。
○ 禁止	グリップを手すり替わりに持ち、横方向の力をかけないでください。 転倒し、ケガをするおそれがあります。	○ 禁止	上体を側方に大きく傾け、グリップに体重をかけるべきしないでください。 転倒してケガをするおそれがあります。
○ 禁止	背もたれを手すり替わりに持たないでください。 転倒してケガをするおそれがあります。	○ 禁止	上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに体重をかけるべきしないでください。 転倒してケガをするおそれがあります。
○ 禁止	グリップを下げた状態でグリップを引張ったり、乗ったりしないでください。 本体が破損し、ケガをするおそれがあります。	○ 禁止	シャワーチェアを水中に流して使用しないでください。 パイプが腐食により破損し、ケガをするおそれがあります。

△注意

○ 禁止	「カビキラー」等の塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒および、温泉水や「六一〇ハット」等の硫酸系の入浴剤をかけるの使用は行わないでください。 パイプが腐食により破損し、ケガをするおそれがあります。	○ 禁止	フラスコや洗剤、研磨剤入りのお掃除剤等は使用しないでください。 フラスコが劣化したは破損し、ケガをするおそれがあります。
○ 禁止	故意にゆすらないでください。 本体が倒れてケガをするおそれがあります。	① 必ず実行	4期とも同じ高さに調整してください。 本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。
① 必ず実行	グリップのロックがしっかりとかかっているか確認してください。 ロックがされていない状態で体重をかけると転倒してケガをするおそれがあります。	① 必ず実行	浴室床の平らで安定した場所に置いてご使用ください。 不安定な場所に置くと、転倒してケガをするおそれがあります。
① 必ず実行	高さ調節時には調節ピンを、確実に固定してください。 本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。	① 必ず実行	パイプと座面・背もたれを固定しているねじがゆるんでいるか確認してください。ねじが緩んでいる時は、ドライバーでねじを締め付け直してください。ねじがはずれると、転倒してケガをするおそれがあります。
① 必ず実行	脚コムが確実に取付けられていることを確認してください。 脚コムが外れていると、滑りやすく、転倒してケガをするおそれがあります。また、浴室の床にキズがつく原因になります。	① 必ず実行	ご使用前、ご使用後は床やチェアについた石鹸やシャンプーを洗い流してください。 石鹸やシャンプーが溜まっていると、すべりやすく、転倒してケガをするおそれがあります。


各部のなまえ

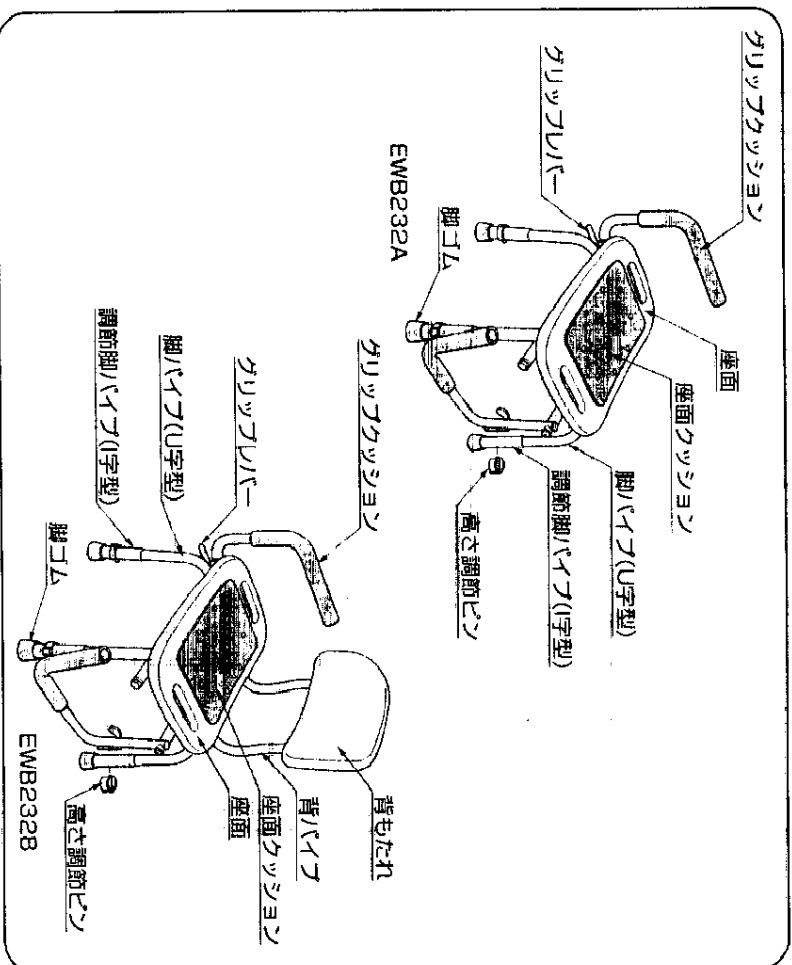

座面クッションの貼り方

①座面表面のチリ・ほこり・水気をしっかりととり、クッションの穴と座面の穴の位置を合わせて貼ります。

②クッションは上から指先でしっかりと押し、貼ってください。

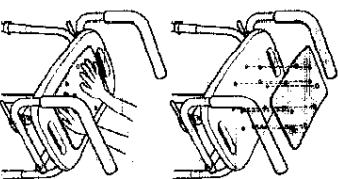


使い方

このシャワーチェアは浴室の洗い場でシャワーを浴びたり、体を洗ったりする際にご使用ください。


①身体状況などに合わせて、使いやすい高さに座面高さを調節してください。
座面高さは36~46cm (5段階) のあいだで高さ調節できます。

座面の高さ調節方法

●高さ調節ピンを座面の中央に向けてさし込む。

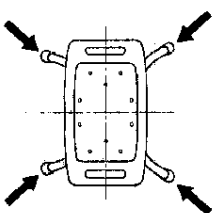


●高さ調節ピン先端が、対面側に貫通するまでさし込む。

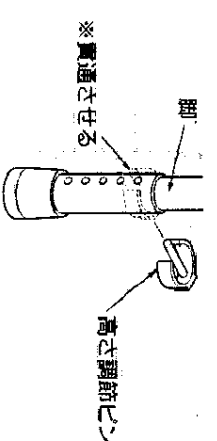

△注意

① 4脚ともに同じ高さに調整してください。本体が不安定になり、転倒してケガをするおそれがあります。

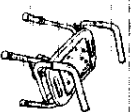

②浴室床の平らな場所に置いてください。


△注意

① 浴室床の平らで安定した場所に置いてご使用ください。不安定な場所に置くと、転倒してケガをするおそれがあります。

③シャワーチェアには深く腰掛けてください。

△注意

① グリッドを手すり替わりに持ち、横方向の力をかけないでください。

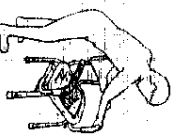

禁止

転倒し、ケガをするおそれがあります。

② 背もたれを手すり替わりに持たないでください。転倒してケガをするおそれがあります。




禁止

使い方


④ご使用前に、お使いになる方に高さご使用者に合わせているか、脚ががたついたり、傾いたりしていないか、再度ご確認ください。

△注意

① バイアと座面・背もたれを固定しているねじがゆるんでいないか確認してください。ねじが弛んでいる時は、ドライバーでねじを締め付け直ししてください。ねじが外れると、転倒してケガをするおそれがあります。

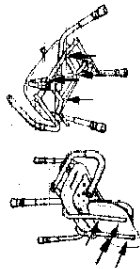

禁止 シャワーチェアを水中に沈めて使用しないでください。パイプが腐食により破損し、ケガをするおそれがあります。

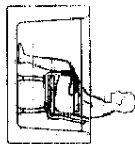


グリップの使い方


グリップは可動式です。移乗の際、また浴槽へ座ったまま出入りする際に邪魔にならないようにグリップを下げてご使用いただけます。

【グリップの下ろし方】

①レバーを上方向に引き上げて、ロックを解除してください。

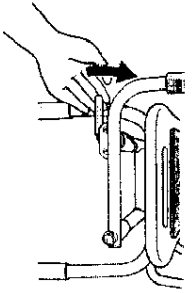


②グリップを下におろします。

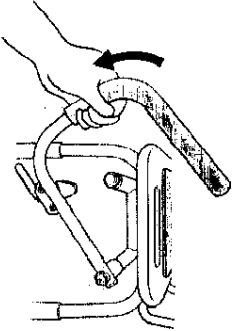


【グリップの上げ方】

①グリップクッション部を持って、グリップを引上げます。

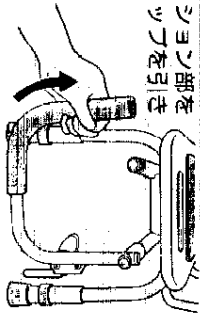


②カッチャツという音がするまで引き上げてください。ロックがしっかりとかかっているか確認してください。グリップを引き上げる際、クッション部に手を挟まないようにご注意ください。

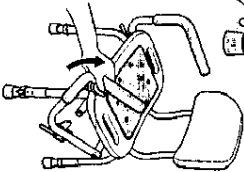

△注意

① グリップのロックがしっかりとかかっているか確認してください。ロックがされていない状態で体重をかけると転倒してケガをするおそれがあります。

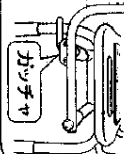

お手入れのしかた


■シャワーチェアは常に清潔に保つように清掃してください。

■適量にうすめた中性洗剤をスポンジが柔らかい布に含ませ、汚れをきれいに拭き取ってください。きれいな布で洗剤を洗い流し、陰干しするか、乾いた布できれいに拭き取ってください。

■直接熱い湯をかけて洗わないでください。クッションが変形することがあります。


■いつも濡れているとカビが発生しやすいので、使用後は乾いた布で水分を拭き取ってください。

■座面クッションやグリップクッションの汚れや傷みがひどい場合は、各クッションを取替えてください。

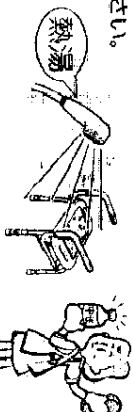

△注意

禁止 「カビキラー」等の塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒および、温泉水や「穴〇ハツツ」等の硫黄系の入浴剤をかけたの使用は行わないでください。パイプが腐食により破損し、ケガをするおそれがあります。

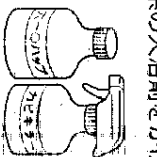

禁止 タウンや磨き粉、研磨剤入りスポンジ等は使用しないでください。塩素系洗剤・シンナー・クレンザー等は使用しないでください。フラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。



製品仕様

項目	仕様	
	背もたれなし：EWB232A	背もたれ付：EWB232B
寸法	幅550mm×奥行455mm×高さ575~675mm	幅550mm×奥行455mm×高さ705~805mm
質量	6kg	7kg
パイプ	アルミ合金アルマイト仕上げ	
座面・背もたれ	材質：ポリエチレン、色：ウエルピソクライト	
座面クッション	材質：エチレンビニルアセテート、色：ウエルピソク	
	接着方法：チーフ接着	
グリップクッション	色：ウエルピソク	
座面高さ	350~450mm (5段階調節)、調節方法：スライド式	

アフターサービスについて

取替えクッションを用意しています。

品名	品番	メーカー希望小売価格
座面クッション	EW57017	¥900
グリップクッション (1本)	EW57020	¥900