

TOTO


取扱説明書 保証書付

シャワーチェアグリップ付

品番 EWB232A/EWB232B型

シャワーチェアコンパクトグリップ付

品番 EWB233A/EWB233B型

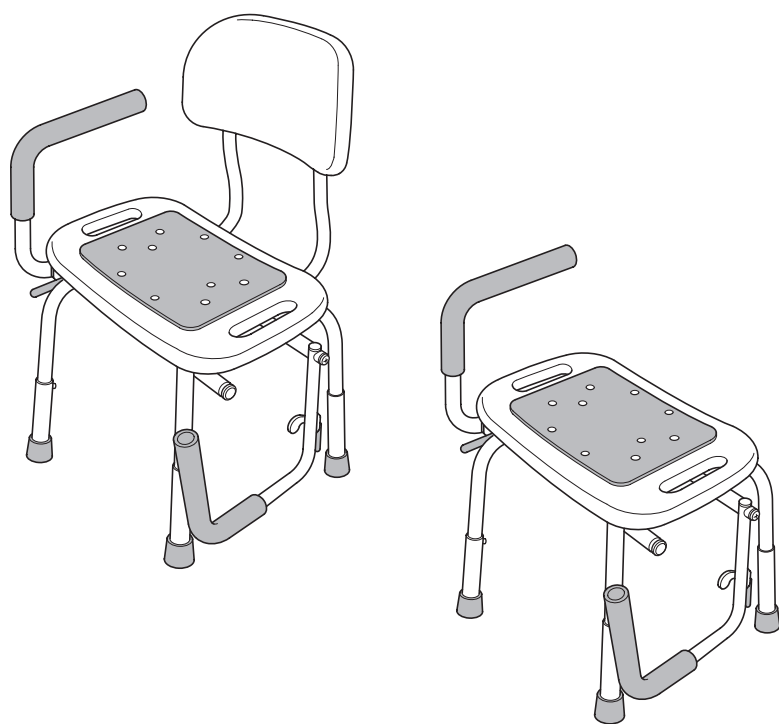

はじめに

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
組立方法	3

使いかた

使いかた	4
------	---

お手入れ

お手入れの仕方	7
---------	---

こんなときは

アフターサービス	7
商品仕様	9

保証書	10
お問い合わせ先	裏表紙


- ◆このたびは、シャワーチェアグリップ付、シャワーチェアコンパクトグリップ付をお求めいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に、取付店名/販売店名、取付日/ご購入日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。



安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表示	意味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。


警告

体重が100kgを超える方は使用しない
本体が破損し、けがをするおそれがあります。


座面の上に立ったり
脚をかけたりしない
転倒して、けがをする
おそれがあります。



グリップを手すり代
わりに持ち、横方向
の力をかけない
転倒して、けがをする
おそれがあります。

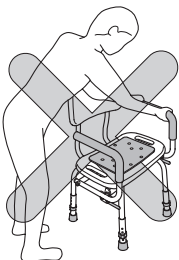

背もたれを手すり代
わりに持たない
転倒して、けがをする
おそれがあります。

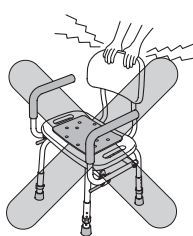


グリップを下げた状
態でグリップを引っ
張ったり、乗ったり
しない
本体が破損し、けがをす
るおそれがあります。




シャワーチェアに2人以上同時に
乗らない
転倒して、けがをするおそれがあります。


飛び乗らない
本体が倒れたり横滑りし、
けがをするおそれあり
ます。

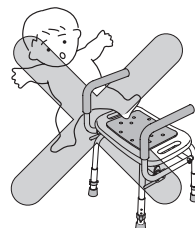


上体を側方に大きく
傾け、グリップに体
重をかけすぎない
転倒して、けがをする
おそれがあります。

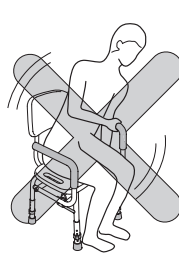

上体を後方に大き
くのけぞり、背も
たれに体重をかけ
すぎない
転倒して、けがをする
おそれがあります。

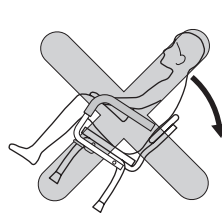

シャワーチェアを
水中に沈めて使用
しない
パイプが腐食により破
損し、けがをするおそ
れがあります。

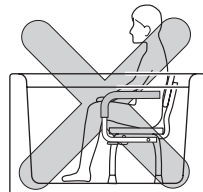

⚠ 警告


「カビキラー」などの塩素系薬剤をかけたの殺菌・消毒および、温泉水や「六〇ハップ」などの硫黄系の入浴剤をかけたの使用は行わない

パイプが腐食により破損し、けがをするおそれがあります。



故意にゆすらない

本体が倒れてけがをするおそれがあります。

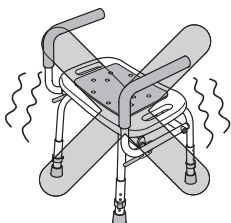

たわしや磨き粉、研磨剤入りのスポンジなどは使用しない
塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは使用しない

プラスチックが劣化または破損し、けがをするおそれがあります。




脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認する

脚ゴムが外れていると、滑りやすく、転倒してけがをするおそれがあります。また、浴室の床に傷がつく原因になります。

4脚とも同じ高さに調整する

本体が不安定になり、転倒してけがをするおそれがあります。

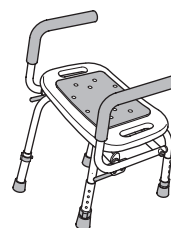


浴室床の平らで安定した場所に置いて使用する

不安定な場所に置くと、転倒してけがをするおそれがあります。

パイプと座面・背もたれを固定しているねじがゆるんでいないことを確認する


万一、ねじがゆるんでいるときは、ドライバーでねじを締め付け直す

ねじが外れると、転倒してけがをするおそれがあります。

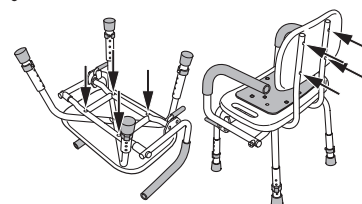

使用前、使用後は床やチェアに付いた石けんやシャンプーを洗い流す

石けんやシャンプーが付いていると、滑りやすく、転倒してけがをするおそれがあります。

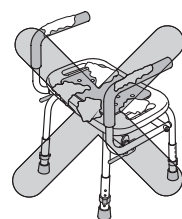

禁止




必ず実行



分解禁止


分解や改造を行わない

商品が破損し、けがをするおそれがあります。

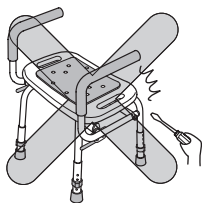

グリップのロックがしっかりとかかっていることを確認する


ロックがされていない状態で体重をかけると転倒してけがをするおそれがあります。

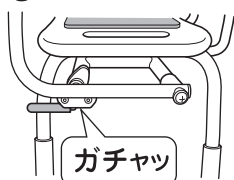


必ず実行

高さ調整ボタンは「カチッ」と音がするまで確実に調整脚パイプ（外側）の穴にはめる

本体が不安定になり、転倒してけがをするおそれがあります。

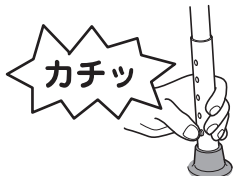


各部のなまえ

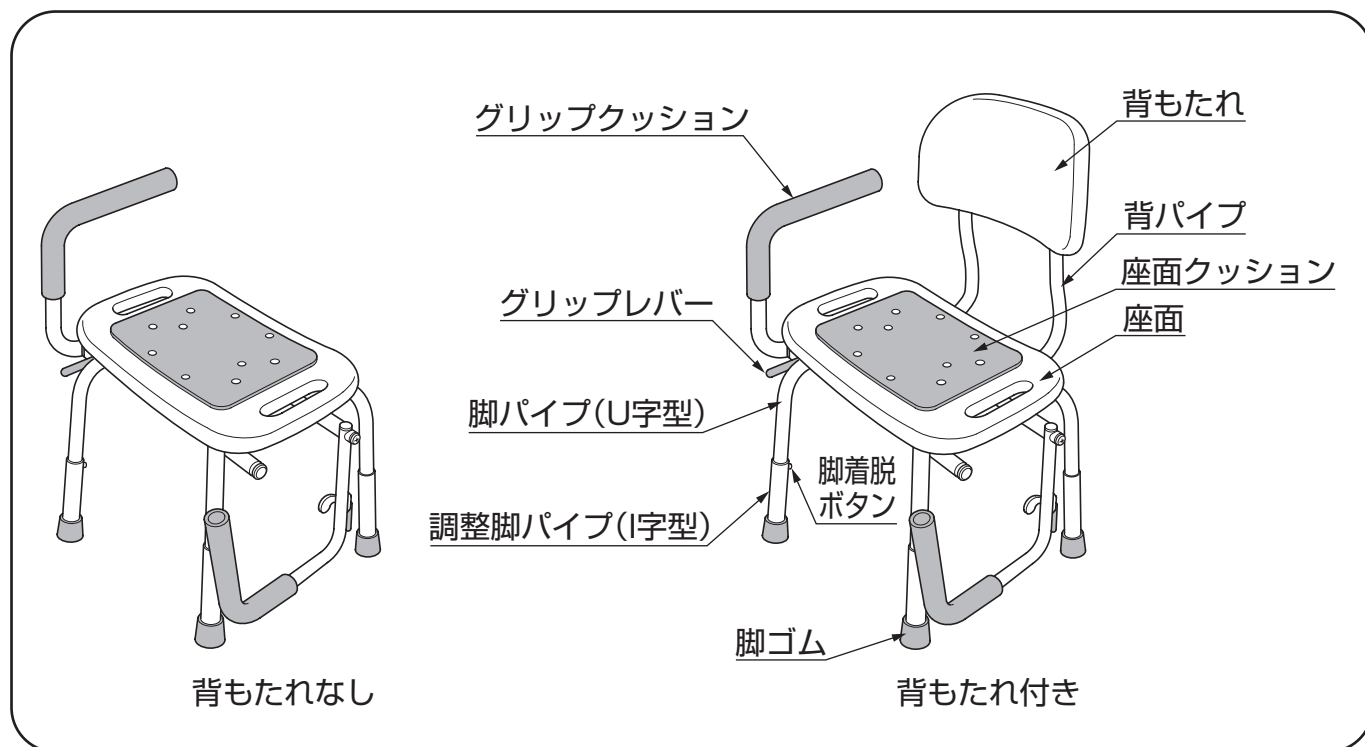


組立方法

座面クッションのはりかた

①座面表面のちり・ほこり・水気をしっかりと取り、クッションの裏面の台紙をはがし、クッションの穴と座面の穴の位置をあわせてはります。

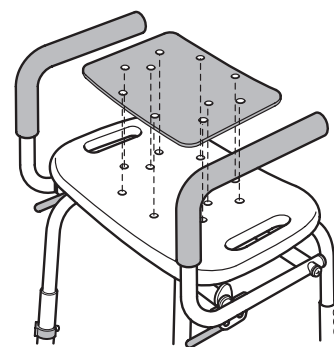

②クッションは上から指先でしっかりと押して、はってください。

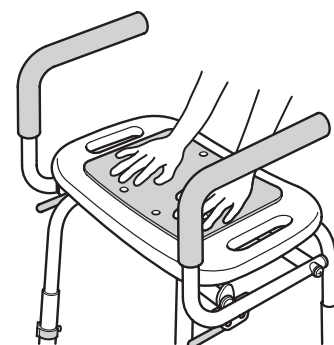


使いかた

このシャワーチェアは浴室の洗い場でシャワーを浴びたり、体を洗ったりする際にご使用ください。


- ①身体状況などにあわせて、使いやすい高さに座面高さを調整してください。
座面高さは36～46cm（5段階）の間で高さ調整できます。

座面の高さ調整方法

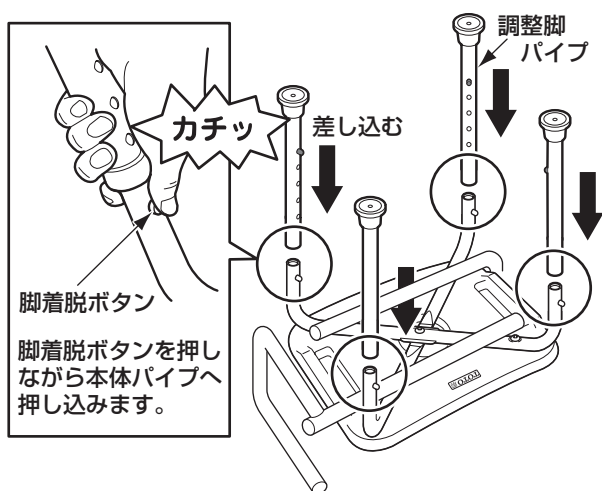

高さ調整ボタンが中に入り込んでしまった場合は

一度調整脚パイプを外し、キャップを取り外し、高さ調整ボタンを脚パイプの穴に入れてください。背もたれも同様にご対応願います。

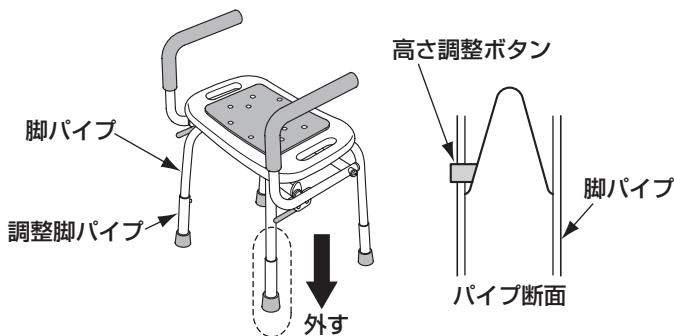

警告



必ず実行

4脚とも同じ高さに調整する

本体が不安定になり、転倒してけがをするおそれがあります。



- ②浴室床の平らな場所に置いてください。

警告



必ず実行

浴室床の平らで安定した場所に置いて使用する

不安定な場所に置くと、転倒してけがをするおそれがあります。

- ③シャワーチェアには深く腰掛けてください。


警告



禁止

グリップを手すり代わりに持ち、横方向の力をかけない


転倒して、けがをするおそれがあります。

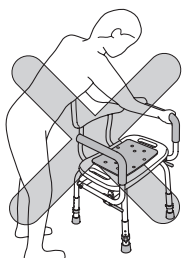


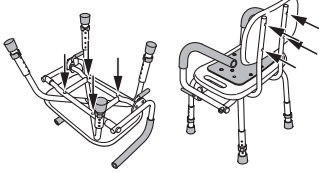

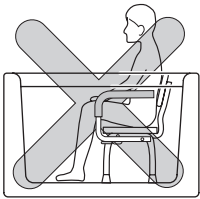
禁止

背もたれを手すり代わりに持たない

転倒して、けがをするおそれがあります。

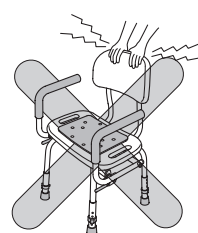

④ご使用前に、お使いになる方に高さが合っているか、脚がガタついたり、傾いたりしていないか、再度ご確認ください。


⚠ 警告		
 必ず実行	<p>パイプと座面・背もたれを固定しているねじがゆるんでいないことを確認するねじがゆるんでいるときは、ドライバーでねじを締め付け直す</p> <p>ねじが外れると、転倒してけがをするおそれがあります。</p> 	 禁止
	<p>シャワーチェアを水中に沈めて使用しない</p> <p>パイプが腐食により破損し、けがをするおそれがあります。</p> 	

グリップの使いかた


グリップは可動式です。移乗の際、また浴槽へ座ったまま出入りする際に邪魔にならないようにグリップを下げてご使用いただけます。

【グリップの下ろしかた】

- ①レバーを上方向に引き上げて、ロックを解除してください。

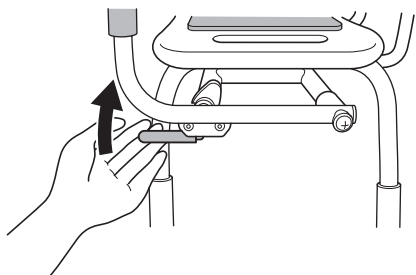


- ②グリップを下に下ろします。

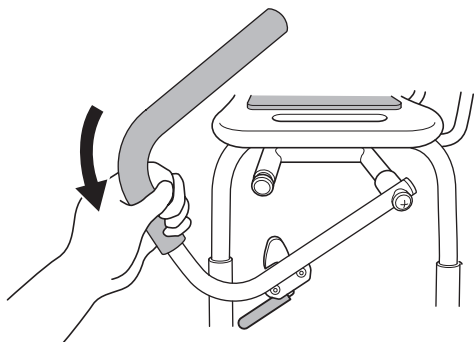



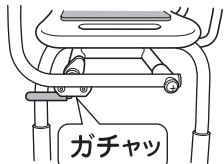
【グリップの上げかた】

- ①グリップクッション部を持って、グリップを引き上げます。

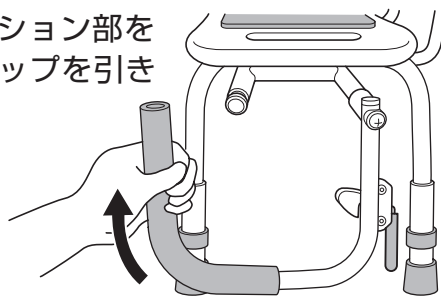

- ②「ガチャッ」という音がするまで引き上げてください。ロックがしっかりとかかっていることを確認してください。
- グリップを引き上げる際、ロック部に手を挟まないように注意してください。

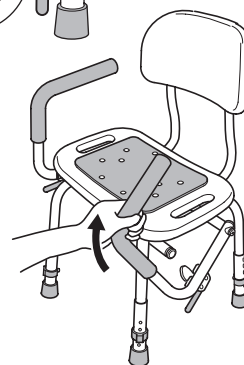

⚠ 警告		
 必ず実行	<p>グリップのロックがしっかりとかかっていることを確認する</p> <p>ロックがされていない状態で体重をかけると転倒してけがをするおそれがあります。</p>	


使いかた

グリップクッションの交換について

グリップクッションの取り外し


古くなったグリップクッションをカッターナイフで切り込みを入れ、グリップクッションを取り除きます。

※取り除くときにカッターナイフでアルミパイプを傷つけないように注意してください。

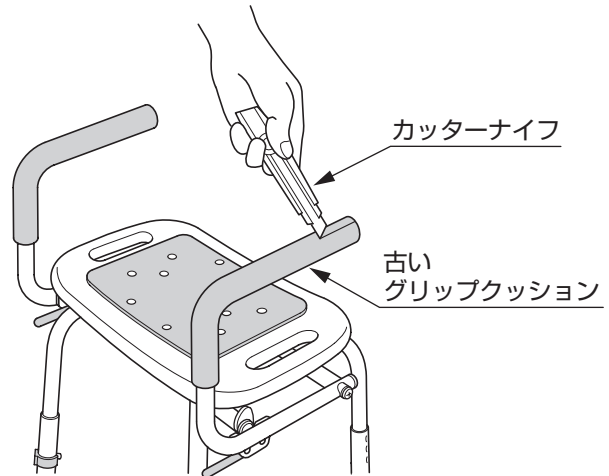




グリップクッションの取り付け

①新しいグリップクッションを石けん水につけます。

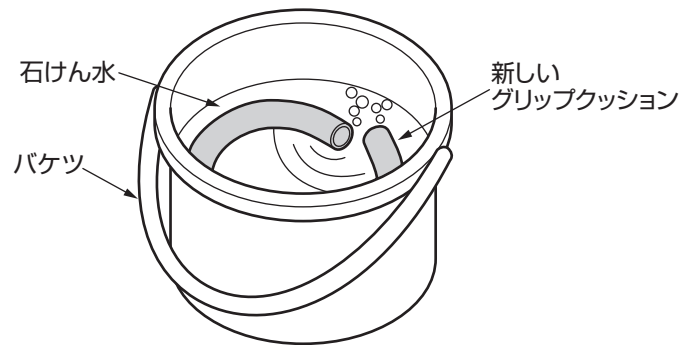

②グリップをロックし、グリップクッションをねじりながら押し込みます。


※グリップクッションはパイプの先端と面一になるまで押し込んでください。

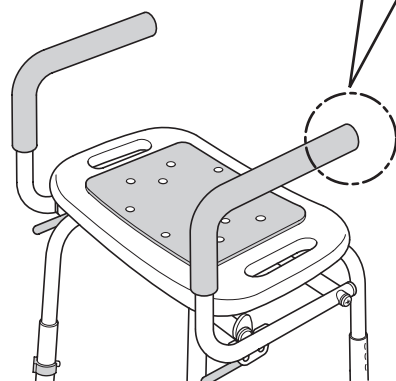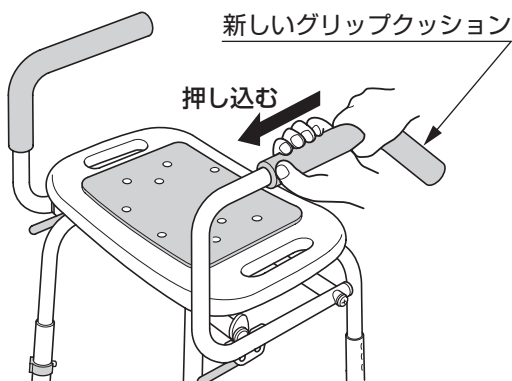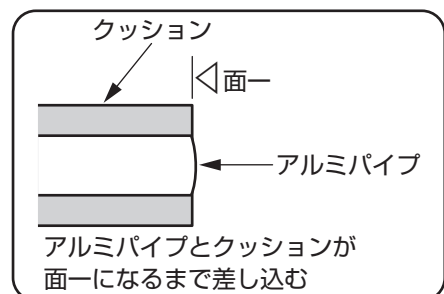

お手入れの仕方

十分な機能を発揮させるため、また、美しく、衛生的にご使用いただくために日ごろのお手入れをお願いいたします。

- シャワーチェアは常に清潔に保つように清掃してください。
- 適量に薄めた中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませ、汚れをきれいにふき取ってください。
きれいな水で洗剤を洗い流し、陰干しするか、乾いた布できれいにふき取ってください。
- 直接熱い湯をかけて洗わないでください。
クッションが変形することがあります。
- いつもぬれているとカビが発生しやすくなりますので、使用後は乾いた布でふき取ってください。
- 座面クッションやグリップクッションの汚れや傷みがひどい場合は、各クッションを取り替えてください。

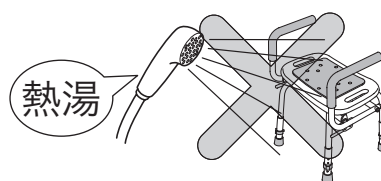

警告



禁止

「カビキラー」などの塩素系薬剤をかけたの殺菌・消毒および、温泉水や「六〇ハップ」などの硫黄系の入浴剤をかけたの使用は行わない
パイプが腐食により破損し、けがをするおそれがあります。

たわしや磨き粉、研磨剤入りのスポンジなどは使用しない
塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは使用しない
プラスチックが劣化または破損し、けがをするおそれがあります。



アフターサービス

保証書（この説明書のP.10が保証書になっています）

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→下記の「修理を依頼されるときは」「修理料金について」をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後7年です。

摩耗・劣化する部品の交換

●摩耗・劣化部品の交換は、お求めの取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ依頼してください。

品名	品番	メーカー希望小売価格
座面クッション	EW57017	¥900（税込価格¥945）
グリップクッション（1本）	EW57020	¥900（税込価格¥945）

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】

お求めの取付店／販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号
- ②商品名
- ③品番
- ④取付日／ご購入日
- ⑤故障内容、異常の状況
- ⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

品番は○部分にはっているラベルでご確認ください。



修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

商品仕様

シャワーチェア品揃え一覧表

項目	仕様			
品番	EWB232A型	EWB232B型	EWB233A型	EWB233B型
品名	シャワーチェア グリップ付 背もたれなし	シャワーチェア グリップ付 背もたれ付	シャワーチェア コンパクトグリップ付 背もたれなし	シャワーチェア コンパクトグリップ付 背もたれ付
寸法	幅580mm×奥行き445mm× 高さ587mm~687mm	幅580mm×奥行き445mm× 高さ705mm~805mm	幅515mm×奥行き410mm× 高さ587mm~687mm	幅515mm×奥行き437mm× 高さ705mm~805mm
質量	4.7kg	5.7kg	4.5kg	5.5kg
パイプ	アルミ合金アルマイト仕上げ			
座面、背もたれ	材質：ポリエチレン、色：ウェルピンクライト			
座面クッション	材質：エチレンビニルアセテート、色：ウェルピンク、接着方法：テープ接着			
グリップクッション	色：ウェルピンク			
座面高さ	360mm~460mm（5段階調整）、調整方法：スライド式			
ご使用重量	100kg以下			

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日／ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店／販売店、またはTOTOメンテナンス(株) (TEL ☎ 0120-1010-05 FAX ☎ 0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ	〒
取付店／販売店	〒	(印)
	電話	—
取付日／ご購入日	年	月 日

商品名	シャワーチェア
品番	EWB232A型、EWB232B型 EWB233A型、EWB233B型
保証期間	取付日／ご購入日から2カ年
保証用途	一般住宅浴室用

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
 - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
 - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
 - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
 - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - (9) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
 - (10) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - (11) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因する不具合。
 - (12) 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。
 - (13) 凍結に起因する不具合。
 - (14) 本書の提示がない場合。
 - (15) 本書にお客様名、取付日／ご購入日、取付店名／販売店名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎ 0120-03-1010 FAX ☎ 0120-09-1010

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526 (有料) へ



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株) 修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休 (一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話 (PHSは除く) からのご利用は… 0570-05-1010 (有料) へ



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株) TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682 (有料) へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>