

段差解消スロープ天然木タイプ

EWA112型・EWA117型

工事店様へ

■商品取り付け後は、お客様にご使用方法を十分ご説明のうえ、この取扱説明書をお渡しください。

お客様へ

■このたびは、段差解消スロープ天然木タイプをお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください。)



ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

表 示	意 味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。


	は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

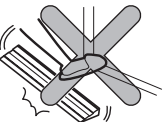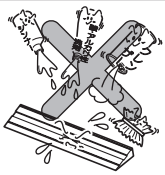 注 意			
 禁止	故意に端部をめくらない 足が引っかかりやすくなり、けがを するおそれがあります。		 必ず実行
	トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベン ジン、シンナーおよびクレンザー、 ナイロンたわしなどの使用は、本 体を傷めるので使用しない スロープがささくれだち、けがをする おそれがあります。		
	ワックスがけはしない スロープが滑りやすくなり、転倒する おそれがあります。		
		ささくれができたときはそのまま 放置せずに、ささくれを取り除く ささくれがささり、けがをするお それがあります。	
		取付ねじがゆるんだ場合は、取 付ねじをしっかりと締め直す ねじ頭で手足をけがしたり、スロー プが不安定になり転倒してけがを するおそれがあります。	

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

商品仕様

■定尺タイプ

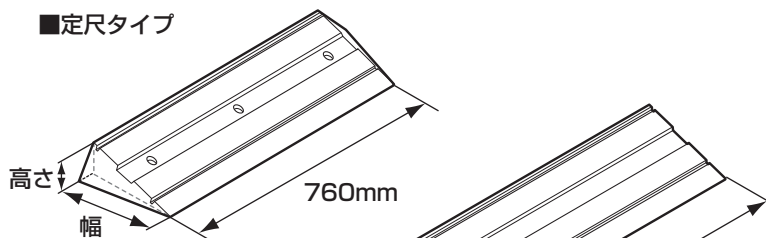

■長尺タイプ (2本1組)



※材質：天然木（集成材）、ウレタン塗装

※色番：#NF(ライトナチュラル)、#PF(パールブラウン)、#BF(ブラウン)

■定尺タイプ

(単位：mm)

品番	対応 段差	商品寸法		
		幅	高さ	長さ
EWA112SH15	14～18	50	15	760
EWA112SH20	19～23	70	20	
EWA112SH25	24～28	90	25	
EWA112SH30	29～33	110	30	
EWA112SH40	39～43	150	40	
EWA112SH50	49～53	190	50	

■長尺タイプ


(単位：mm)

品番	対応 段差	商品寸法		
		幅	高さ	長さ
EWA117RH15	14～18	50	15	2000
EWA117RH20	19～23	70	20	
EWA117RH25	24～28	90	25	
EWA117RH30	29～33	110	30	

裏面へつづく

使いかた

- トイレ・洗面所の出入口や居室内の段差部に設置してください。
- ワックスがけはしないでください。

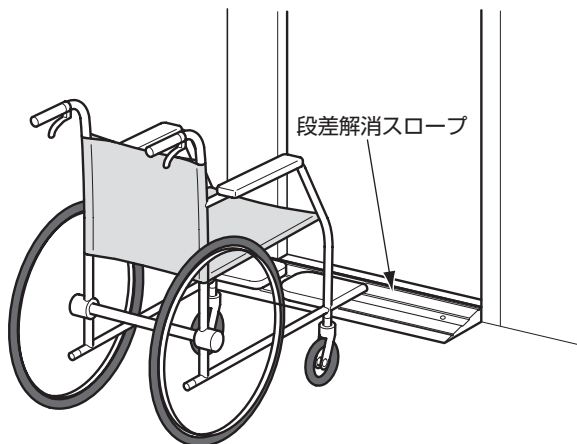

⚠ 注 意	
 禁止	故意に端部をめくらない 足が引っかかりやすくなり、けがをす るおそれがあります。
	ワックスがけはしない スロープが滑りやすくなり、転倒する おそれがあります。

お手入れのしかた

通常のお手入れのしかた

通常は、よく絞った柔らかい布などでふいてください。

汚れがひどいときのお手入れのしかた

適当に薄めた中性洗剤を含ませた布でふき取ったあと、
水でぬらしてよく絞った柔らかい布などでふいてください。

お手入れするときの注意

- トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、およびクレンザー、ナイロンたわしなどの使用は、本体を傷めるので使用しないでください。
- ささくれができたときはそのまま放置せずに、ささくれを取り除いてください。
- 取付ねじがゆるんだ場合は、取付ねじをしっかりと締め直してください。

⚠ 注 意			
 禁止		トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナーおよびクレンザー、ナイロンたわしなどの使用は、本体を傷めるので使用しない スロープがささくれだち、けがをする おそれがあります。	ささくれができたときはそのまま 放置せずに、ささくれを取り除く ささくれがささり、けがをするおそれ があります。
		必ず実行	取付ねじがゆるんだ場合は、取 付ねじをしっかりと締め直す ねじ頭で手足をけがしたり、スロー プが不安定になり転倒してけがを するおそれがあります。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02

受 付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間： 9:00～18:00



交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

【お客様の個人情報のお取り扱い】 お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>