

TOTO バスリフトの使い方ガイド

この使い方ガイドは浴室でもご使用頂けます。

入浴方法

<入るとき>

バスリフトに移乗

入浴台などに腰掛けた状態から、バスリフトに移乗します。



降ろしている途中

リモコンスイッチの青いボタン(下)を押すと、シートが下がります。ボタンをはなせば途中で停止します。

青いボタン(下)を押す



降ろしきったところ

シートを浴槽の底まで降ろし、入浴をお楽しみください。



<出るとき>

バスリフトから移乗

バスリフトに腰掛けた状態から、入浴台などに移乗します。



上がっている途中

リモコンスイッチの赤いボタン(上)を押すと、シートが上がります。ボタンをはなせば途中で停止します。

赤いボタン(上)を押す



お湯に浸かっているところ

身体が温まったらお湯から上がりましょう。

※バスリフトの操作は、必ず介助者が行ってください。
※入浴や浴槽の形状によっては、肩までお湯に浸かれな場合があります。
※浴室に手すりを取り付けるとより安全性が高まります。
※バスリフトに腰掛けたとき、足が浴槽底につかず、ご利用者が不安を感じられるような場合は、介助者の方が身体を支えていると安心です。


介助者がいない方のご使用は、危険ですのでおすすめてできません!



電池の充電方法

- 1 充電器のプラグをコンセントに差し込むと充電ランプが点滅します。
- 2 右図のように、電池を充電器の底に当たるまでしっかりと差し込むと充電開始。充電ランプが連続点灯します。
- 3 充電は約70分で終了します。充電が完了すると、充電ランプが点滅を繰り返します。プラグをコンセントから抜き、充電器から電池を抜き取ってください。

※充電器を浴室内や湿気の多い場所に持ち込んで充電をしないでください。

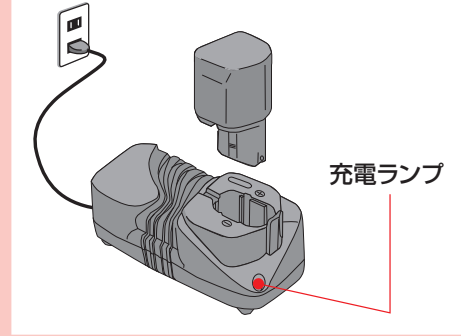

電池の取り付け方法

- 1 カバークッションを持ち上げて、取り外します(カバークッションは面ファスナーで固定されています)。
- 2 電池カバーを開けて、図の向きで充電した電池を電池ホルダーに差し込み、電池カバーを閉じます。
- 3 カバークッションを取り付け、面ファスナー部分をしっかりと押さえて固定します。
- 4 シートを5cm程度上下させて、電池の残量を確認します。リモコンスイッチの電池残量警告ランプが点灯したら、シートは下降しませんので、電池を充電してください。



ポイント

使用後は電池を取り外し、湿気の少ないところに保管してください。


●問い合わせ先

TOTO バスリフトの使い方ガイド

シートの両側の白い部分がフラップです。


短いフラップを洗い場側に向け取り付けます。

●フラップ (長いフラップ)
●フラップ (短いフラップ)

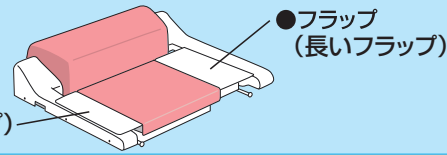

シートの取り外し方法


1

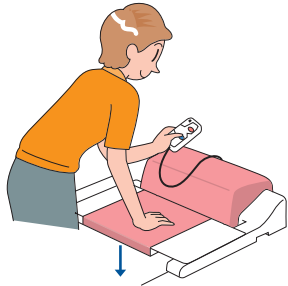


シートの座面を下に押しながら、リモコンスイッチの「下」ボタンを押し、シートを10cmほど下げます。

2

▼フラップ(短いフラップ)側

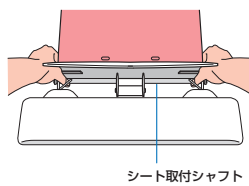

シート取付シャフト

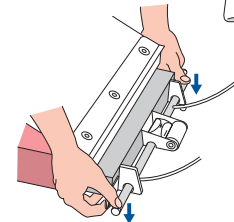


▲フラップ(長いフラップ)側

フラップ(長いフラップ)を上げ、シート取付シャフトとシートの切り欠き部(2カ所)を外します。次にフラップ(短いフラップ)を上げ、同様に外します。

※シートを取付シャフトから外すとシートが落下しやすくなりますので、手でしっかりと持ってください。また、その際にシート裏面のスライド部に指を挟まないように注意してください。

シートの取り付け方法

1

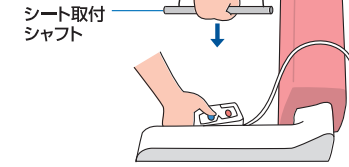


シート取付シャフト

左右のシート取付シャフトを下に押しながら、リモコンスイッチの「下」ボタンを押し、最上点より10cmほど下げます。

2

▼フラップ(短いフラップ)側

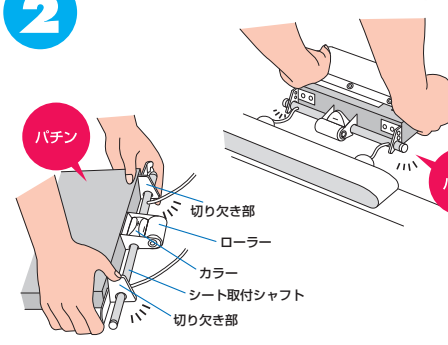

パチン

切り欠き部

ローラー

カラー

シート取付シャフト

切り欠き部

パチン

▲フラップ(長いフラップ)側


フラップ(短いフラップ)を洗い場側に向け、シートのローラーの間にシート取付シャフトのカラー(白い樹脂部)がくるように位置をあわせ、フラップ(長いフラップ)側から、シートの2カ所の切り欠き部をシート取付シャフトへ「パチン」という音がするまで押し込みます。次にフラップ(短いフラップ)側も同様に取り付けます。

※シート取付シャフトが全ての切欠き部の奥まで確実に入っていることを必ずご確認ください。

困ったときは…

「バスリフトが動かない!」など困ったときは、まず、このページに沿ってご確認ください。それでも異常がある場合は、表面の問い合わせ先までご連絡ください。

リモコンスイッチのボタンを押してもシートが上昇・下降しない。

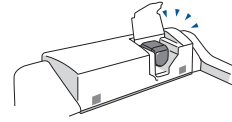


●電池は取り付けられていますか?
電池カバーを開けてご確認ください。



●電池は十分に充電されていますか?
電池の残量が0になると、電池残量警告ランプは点灯しません。



●電池はきれいな状態で充電されていますか?
水滴や汚れが付着していると正しく充電されません。

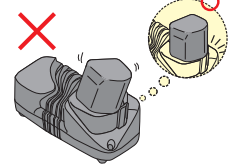


●正しく充電されていますか?
充電器に電池をしっかりと差し込まないと正しく充電されません。



●座る位置が偏っていませんか?
バスリフトはワイヤー4本に均等に想定以上の荷重がかからないと停止することがあります。

リモコンスイッチのボタンを押しても、シートの上昇はできるのに下降しない。

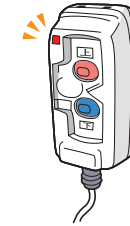

●リモコンスイッチの電池残量警告ランプが点灯していませんか?
電池が残量不足のため、下降はしません。


十分に電池を充電したのに、すぐに電池残量警告ランプが点灯する。




●バスリフトの昇降回数の目安は、フル充電した電池で約15回(ご利用者様の体重が60kgの場合)です。昇降回数が極端に減った場合は、電池の寿命が考えられますので、表面の問い合わせ先までご連絡ください。



●電池は十分に充電されていますか?

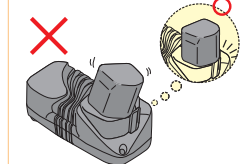


●正しく充電されていますか?
充電器に電池をしっかりと差し込まないと正しく充電されません。

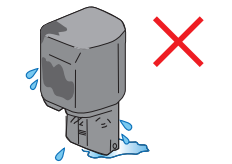

●電池はきれいな状態で充電されていますか?
水滴や汚れが付着していると正しく充電されません。

正しく充電しているのに昇降回数が減ってきてしまったら、電池のリフレッシュを!

①カバークッションを外し、電池カバーを開けて、リモコンスイッチの青いボタン(下)を押しながら電池ホルダーに電池をセットします。

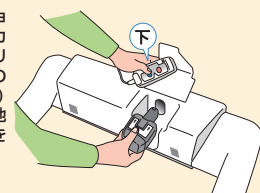

②リモコンスイッチの電池残量警告ランプが点滅します。約22時間でランプが消え、リフレッシュ終了。充電が空になりますので、使用するときは充電してください。

