


ご使用前に必ずお読みください

⚠ 警告

❗ 必ず実行


使用する際、必ず介助者が付添う。介助者は使用者の姿勢が前後左右に傾かないように動作状況を常に確認する

落下や機器の誤動作の誘発によりおぼれたりけがをする原因になります。

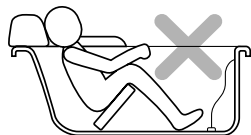


シートが確実に取り付けられているかを確認する

取り付けが不十分だとシートが落下し、おぼれたり、けがをする原因になります。

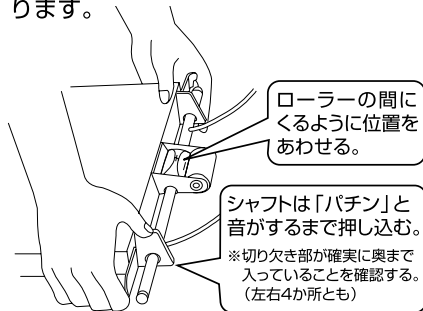

ワイヤーは取扱説明書に従って点検する


ワイヤーが劣化した状態でご使用になりますと、使用中にワイヤーが破断し、シートが落下し、おぼれたり、けがをする原因になります。

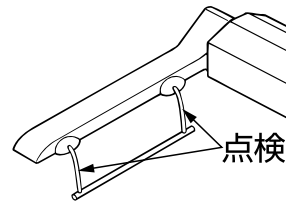

⊘ 禁止

このフラップに体重をかけたり移乗したりしない

このフラップに体重が加わると、破損したり外れたりしてけがをするおそれがあります。

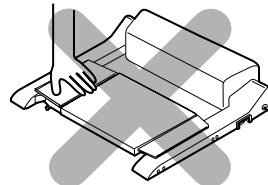

使用上のご注意

ボタンを押していない時にランプが点灯している場合は必ず充電する


電池残量が不足しているため下降せず入浴ができないおそれがあります。

ランプが点灯していないこと。



プーリーカバー

フラップ

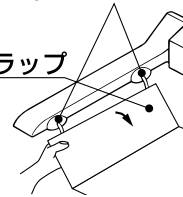

フラップを外側へ押し付けた状態でシートを上昇させ、フラップがプーリーカバーを押し上げると検知スイッチが働き上昇が停止してしまいます。その時はフラップを内側に寄せてください。